


ベストポジションバーシリーズ

ベストポジションe 専用耐水ベース

BEST POSITION BAR BPE-100-80、81、90

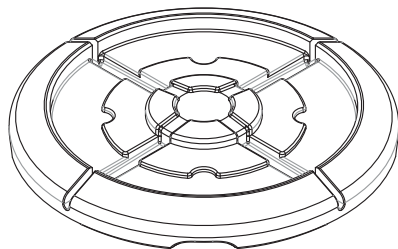

設置時貼り直し可能

取扱説明書

この度は、弊社製品をご利用くださり、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

仕様

寸法	φ200
ベース	エラストマー
クッション	EVA
粘着剤	シリコーン粘着

安全にお使いいただくために

- ◆この耐水ベースは、タイル・コンクリート・モルタル床専用ベースです。
- ◆この耐水ベースは、ベストポジションeシリーズ専用の下部ベースです。他の製品と組み合わせて使用しないでください。
- ◆ベストポジションe製品の設置・取り外しは必ず、業者の方が行ってください。

設置できない場所

安全のため必ずお守りください。



禁止

天井に水分が掛かる場所、浴室には設置しないでください
天井ベースが滑り、外れて転倒し、重大事故につながります。

タイル・コンクリート・モルタル以外の床
取り外し時に表面を剥がす恐れがあります。

塗装処理された床
塗装面が外れて転倒し、重大事故につながります。

凹凸や歪みの大きな場所
粘着力が弱く下部ベースが滑り、外れて転倒し、重大事故につながります。

設置上の注意

安全のため必ずお守りください。



必ず実行

床の強度を確認してください。
ひび割れや浮きがあると、外れて転倒し、重大事故につながります。

天井の強度を確認してください。
軒下等の天井は強度が弱い場合があり、天井が破損したり、本体がズレたり、外れて転倒し、重大事故につながります。