

施工説明書

この度は、弊社製品をご利用くださり、誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用
ください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管
してください。

安全にお使いいただくために

- ◆この製品はベストポジ-e 専用のオプションです。他社の製品と組み合わせて使用しないでください。
- ◆本製品は、手すりとしての目的以外では使用しないでください。
手すり以外での使用は重大事故の原因となります。
- ◆ベストポジ-e 製品の設置・取り外しは必ず、販売店、施工業者の方が行なってください。
- ◆取り付け後は、取扱説明書の十分な説明を行なったうえで、ご利用者にお渡しください。

設置上の注意

安全のため必ずお守りください。



必ず実行

製品と周囲の壁や物との間に間隔がないと、身体や四肢が挟まり、重大な事故につながります。設置の際は、十分なすき間を空けて設置してください。
身体的不安定な方は使用しないでください。




取扱上の注意

安全のため必ずお守りください。



滑り止めが傷んで劣化している場合は、滑り止めを交換してください。
本体の破損やブラケットの固定に問題が発生し、重大事故につながります。

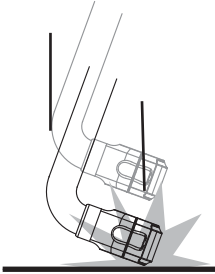


木製品は落下などの衝撃で木部が割れる可能性があります。取り扱いに十分ご注意ください。



木製品は水分のかかる場所では、使用しないで下さい。腐食及び破損の原因となります。



取り外す際、ブラケットの滑り止めが外れにくい場合、強引に引っ張らないでください。木部が破損する可能性があります。

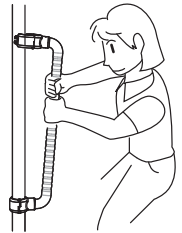


輸送時はベースジョイント本体から外してください。
付けたままの輸送は製品を傷め、事故の原因となります。

手すりの取り付け手順

安全のため必ずお守りください。

- ①上下ブラケットの固定ボルトを緩めブラケットを開き、ポールの取り付け位置に合わせます。
- ②上のブラケットから取り付け、ブラケットを閉じ、六角レンチ 5mmで固定用ボルトを締め、しっかりと固定されていることをご確認下さい。

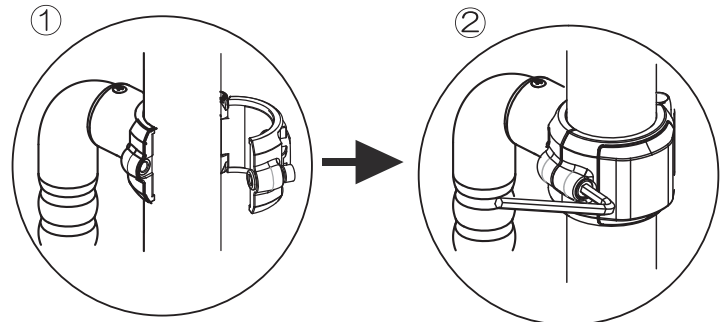

※ネジの締め付けは上下均等に行ってください。
※D型・b型・b型ロングは上下を逆に設置も可能。

販売店・施工業者の方へ

- ブラケット内側の滑り止めは消耗品です。厚みが薄くなったり摩耗、汚れがある場合は交換してください。

(交換用部材：システムブラケット 滑り止め 10枚入
品番：SBR-300-40 定価 ¥2,500)


- オプション手すりのブラケットは横手すりと接続が可能です。詳しくは木・伸縮手すり施工説明書をご参照ください。

(木・伸縮手すり施工説明書)



木・伸縮手すり施工説明書 PDF

組合せ例

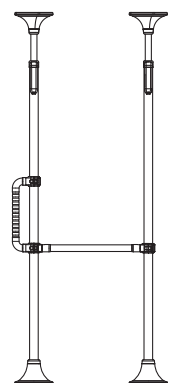


● ウェーブ型手すり / ロング BPE-300-10、40


● I 型手すりロング BPE-300-120

仕様


手すり径	φ35
手すり部	木集成材
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ (I型はボール2個付)
商品重量	BPE-300-10 0.53kg(145×74×400)
商品寸法	BPE-300-40 0.62kg(145×74×650) BPE-300-120 0.91kg(147.5×74×950)

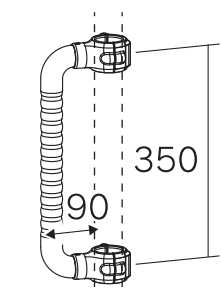

ウェーブ型
BPE-300-10

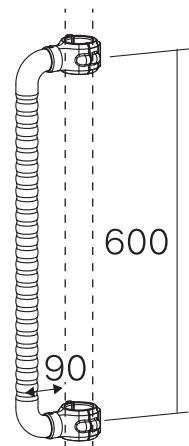


ウェーブ型ロング
BPE-300-40

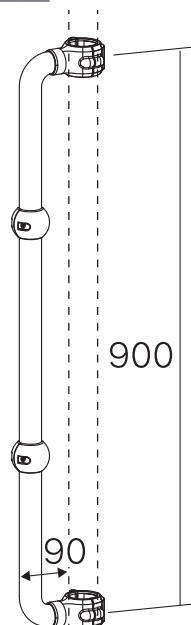

I型ロング
BPE-300-120

● I 型手すりへのグリップの取り付け方法

グリップのボルトをプラスドライバーで外し、木手すりを挟み込み、ボルトを再度つけて、グリップがズレないところまで締め付ける。

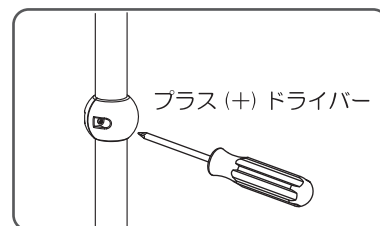


● D 型手すり BPE-300-110


● b 型手すり / ロング BPE-300-90、100

仕様


手すり径	φ35
手すり部	木集成材
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	BPE-300-110 0.53kg(237.5×72.5×250)
商品寸法	BPE-300-90 0.64kg(257.5×72.5×400) BPE-300-100 0.8kg(257.5×72.5×650)

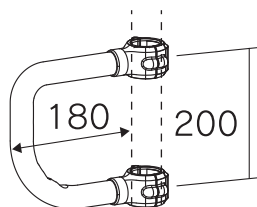

D 型
BPE-300-110

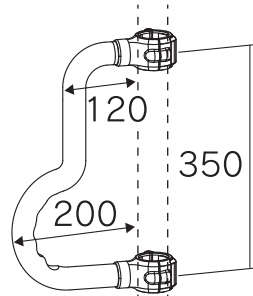

b 型
BPE-300-90

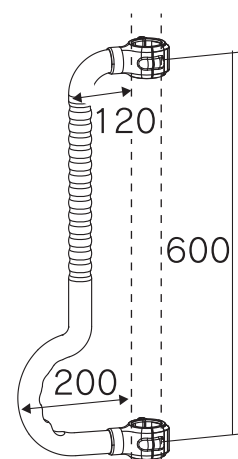

b 型ロング
BPE-300-100



使用上の注意事項

回転方向に引っ張るような使い方はしないでください。本体のズレや事故の原因となります。


● グリップアーム -e 5P 斜 BPE-300-50

● グリップアーム -e 5P BPE-300-60


● グリップアーム -e 3P BPE-300-70

仕様


手すり径	φ35
手すり部	アルミ・樹脂
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	BPE-300-50 0.84kg(205×74×598)
商品寸法	BPE-300-60 0.8kg(168×74×600)
	BPE-300-70 0.66kg(168×74×405)

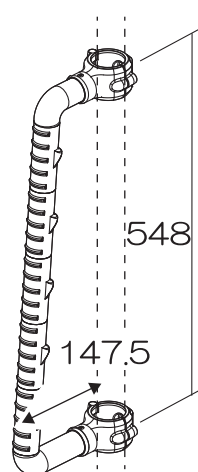

BPE-300-50

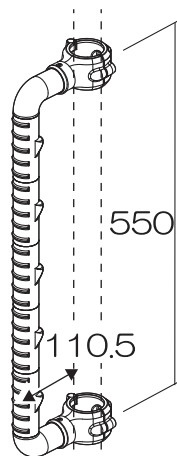

BPE-300-60

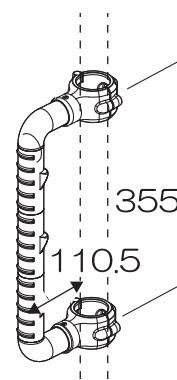

BPE-300-70

●水のかかる場所での手すり使用には、樹脂製の
グリップアーム -e を使用してください。

(必要に応じて、耐水ベースを併用してください。ベースポジ -e 施工説明書参照)

施工・貸与事業者様へ

製品をお引き渡しの前に、ご利用者への取扱説明は必ずおこなってください。
利用者が、取扱説明をご理解できない場合、また身体状況の変化等により理解
・厳守が難しくなった場合は、ご利用を控えて下さい。

製品・施工関係問い合わせ
DIPPER ホクメイ株式会社

〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里2-4-1
TEL.06-6754-0625 Fax.06-6758-6485

東京
TEL.03-5818-0621 Fax.03-5818-0624

名古屋
TEL.052-459-3004 Fax.052-453-1277

福岡
TEL.092-686-9300 Fax.092-686-9260

在庫・発送状況問い合わせ
DIPPER ホクメイ株式会社 受注センター

〒693-0043 島根県出雲市長浜町516-46
TEL.0853-28-0521 Fax.0853-28-2128

■商品の仕様・説明書の内容は、予告なく変更する場合があります。

製造元 **ホクメイ株式会社**

総販売元 **DIPPERホクメイ株式会社**

URL <http://www.dipper-hokumei.co.jp>