



Our BestPositionBar Continue Evolving

手すりオプション類

施工説明書

この度は、弊社製品をご利用くださり、誠にありがとうございます。
ご使用になる前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくご使用
ください。お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管
してください。

安全にお使いいただくために

- ◆この製品はベストポジシリーズ専用のオプションです。他社の製品と組み合わせて使用しないでください。
- ◆本製品は、手すりとしての目的以外では使用しないでください。手すり以外での使用は重大事故の原因となります。
- ◆ベストポジ・ベストポジ-e 製品の設置・取り外しは必ず、介護ショップ、レンタル・施工業者の方が行なってください。
- ◆取り付け後は、取扱説明の十分な説明を行ってください。
- ◆この施工説明書は、施工業者 / 取扱店で大切に保管・管理してください。

木製オプション類共通仕様（末尾に V の付く品番・木部に下記のマークの付いた製品）



製品上の特定のウイルスの数を減少させます。
無機抗菌加工剤・塗装
木部本体
JP0612520A0002T

SIAA マークは抗菌製品技術協
議会ガイドラインで品質管理・情報公
開された製品に表示されています。



無機抗菌加工剤・塗装
木部本体
JP0122520A0003Q

SIAA マークは抗菌製品技術協会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に表示されています。


設置上の注意

安全のため必ずお守りください。



必ず実行

製品や、製品と周囲の壁や物との間に身体が挟まらない事をご確認ください。身体や四肢が挟まると重大事故につながります。付属品の選定や設置の際は、十分なすき間を空けるなど配慮し、設置してください。

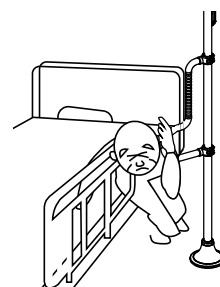


取扱上の注意

安全のため必ずお守りください。



滑り止めに傷やヘタリ、劣化などが見られる場合は、滑り止めを交換してください。本体の破損やブラケットの固定に問題が発生し、重大事故につながります。

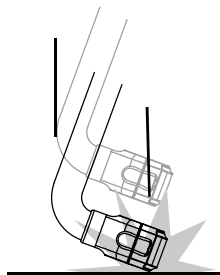


木製品は落下や衝撃で、割れる可能性があります。取り扱いに十分ご注意ください。
持ち運びの際も落下等にご注意ください。



木製品は水分のかかる場所では、使用しないで下さい。腐食及び破損の原因となります。



取り外す際、ブラケットの滑り止めが外れにくい場合、強引に引っ張らないでください。木部が破損する可能性があります。

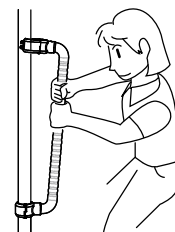



輸送時はベースポジ本体から外して下さい。
付けたままの輸送は製品を傷め、破損の原因となります。

手すりの取り付け手順

安全のため必ずお守りください。

①上下ブラケットの固定ボルトを緩めブラケットを開き、ポールの取り付け位置に合わせます。

②上のブラケットから取り付け、ブラケットを閉じ、六角レンチ 5mm で固定用ボルトを締め、しっかりと固定されていることをご確認ください。

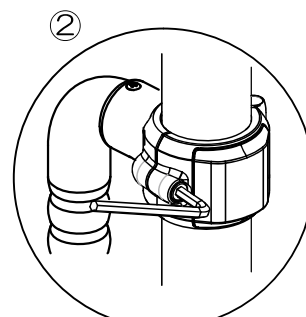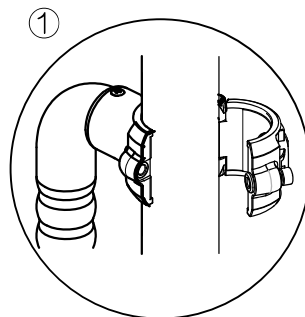

※ネジの締め付けは上下均等に行ってください。
※D型・b型・b型ロングは上下を逆に設置も可能です。

販売店・施工業者の方へ

- ブラケット内側の滑り止めは消耗品です。厚みが薄くなったり摩耗、汚れがある場合は交換してください。

交換用部材：システムブラケット 滑り止め 10枚入
品番：SBR-300-40 定価¥2,500（税別）


- ウェーブ型手すりのブラケットは横手すりと接続が可能です。詳しくは木・伸縮手すり施工説明書をご覧ください。

（木・伸縮手すり施工説明書）



木・伸縮手すり施工説明書 PDF

組合せ例

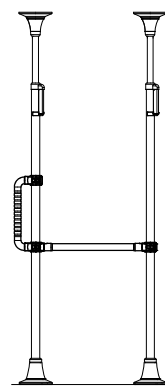

ウェーブ型手すり / ロング


BPZ-500V/BPZ-500VL

I型手すり


BPZ-630V

仕様 **SIAA** 抗ウイルス加工 **SIAA** 抗菌加工


手すり径	φ35
手すり部	木集成材
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ (I型はボール2個付)
商品重量	BPZ-500V 0.53kg(145×74×400)
商品寸法	BPZ-500VL 0.62kg(145×74×650)
	BPZ-630V 0.91kg(147.5×74×950)

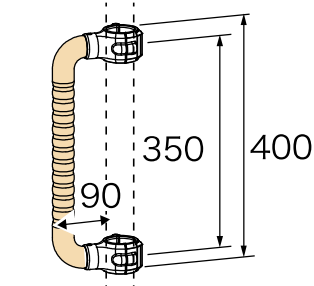

ウェーブ型手すり
BPZ-500V

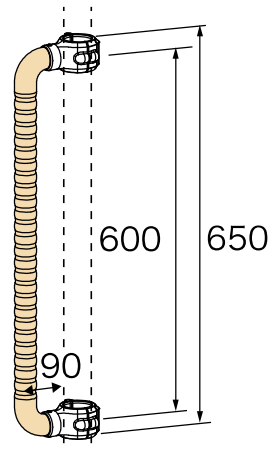

ウェーブ型手すりロング
BPZ-500VL

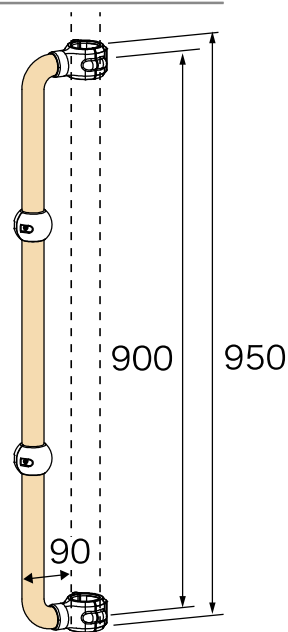

I型手すり
BPZ-630V

グリップアーム 3P

BPE-300-70

グリップアーム 5P


BPE-300-60

グリップアーム 5P 斜


BPE-300-50

仕様


手すり径	φ35
手すり部	アルミ・樹脂
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	BPE-300-70 0.66kg(168×74×405)
商品寸法	BPE-300-60 0.8kg(168×74×600)
	BPE-300-50 0.84kg(205×74×598)

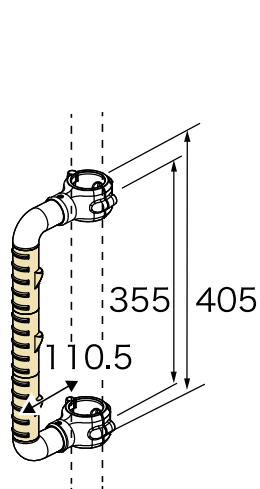

BPE-300-70

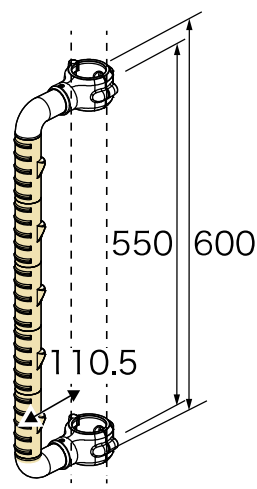

BPE-300-60

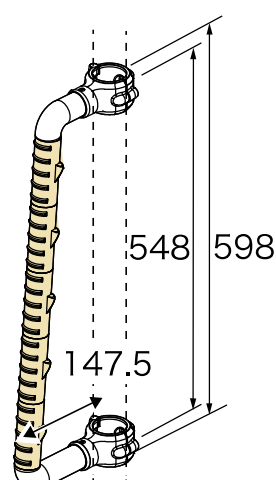

BPE-300-50

●水のかかる場所での手すりの使用には、耐水性のあるグリップアームを、使用してください。

(必要に応じて、耐水ベースを併用してください。ベース施工説明書参照)

● D 型手すり


BPZ-620V

● b 型 / b 型手すりロング


BPZ-600V/610V

仕 様


手すり径	φ35
手すり部	木集成材
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	BPZ-620V 0.53kg(237.5×74×250)
商品寸法	BPZ-600V 0.64kg(257.5×74×400)
	BPZ-610V 0.8kg(257.5×74×650)

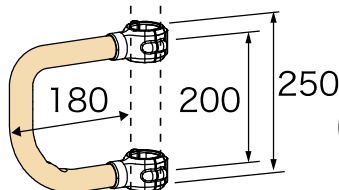

D 型
BPZ-620V

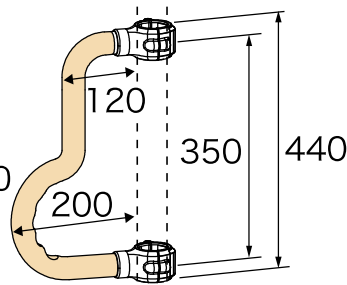

b 型
BPZ-600V

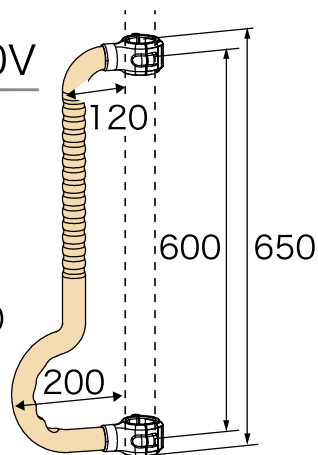

b 型ロング
BPZ-610V



使用上の注意事項

回転方向にねじるような使い方はしないでください。
本体のズレや事故の原因となります。

● ツイン手すり

ウェーブ型ロング+ウェーブ型ロング BPZ-310V

● ツイン手すり

ウェーブ型ロング+D 型 BPZ-300V

ブラケット対応角度

90°


135°

180°




仕 様

手すり径	φ35
手すり部	木集成材
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	BPZ-310V 1.25kg 225×74×650
商品寸法 (最大寸法)	BPZ-300V 1.20kg 315×74×850

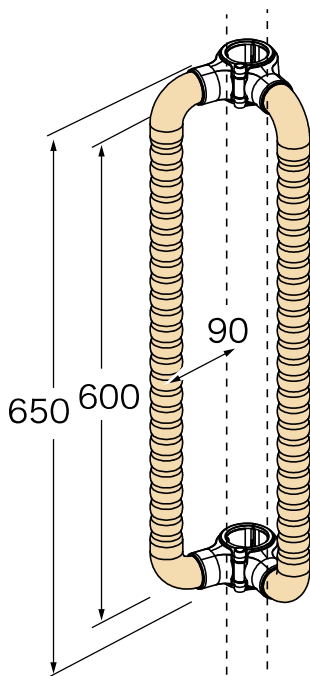

ツイン手すりW+W
BPZ-310V

225mm (最大 180° 展開時)

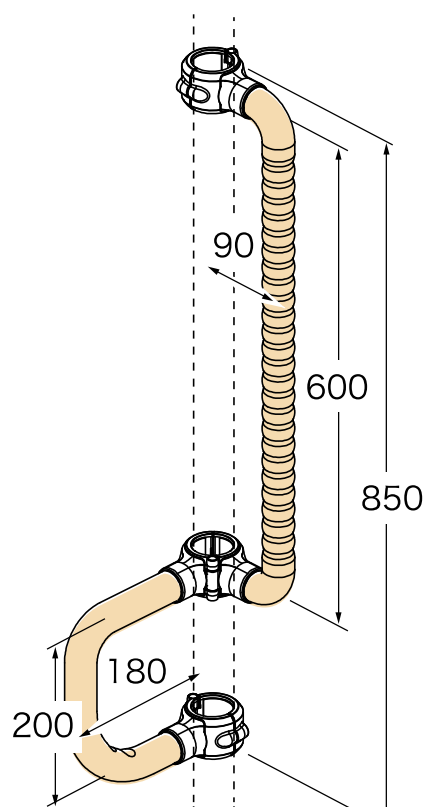


ツイン手すりW+D
BPZ-300V

315mm (最大 180° 展開時)


ブラケットの組み替え方

90° から 135° への組み替え例

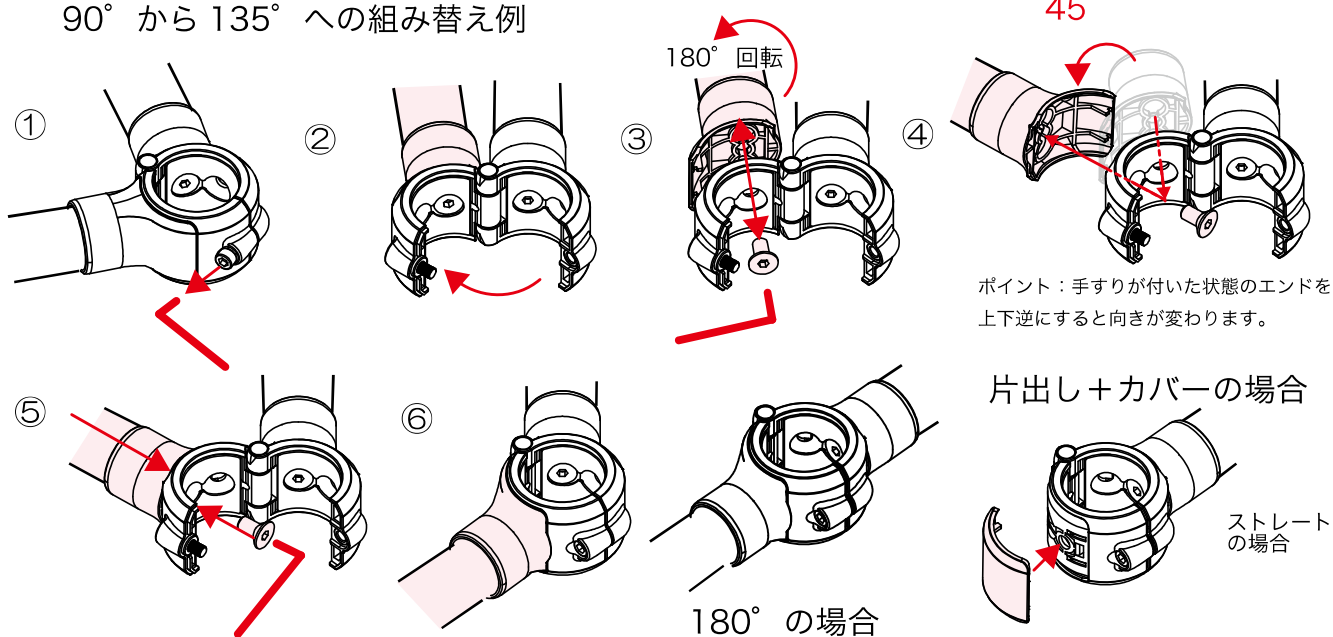


組み合わせ方 ウェーブ型ロング+D 型








左右逆・上下逆 (D 型)・上下移動 (D 型) の組み替えと
角度 90°・135°・180° の組み合わせパターン

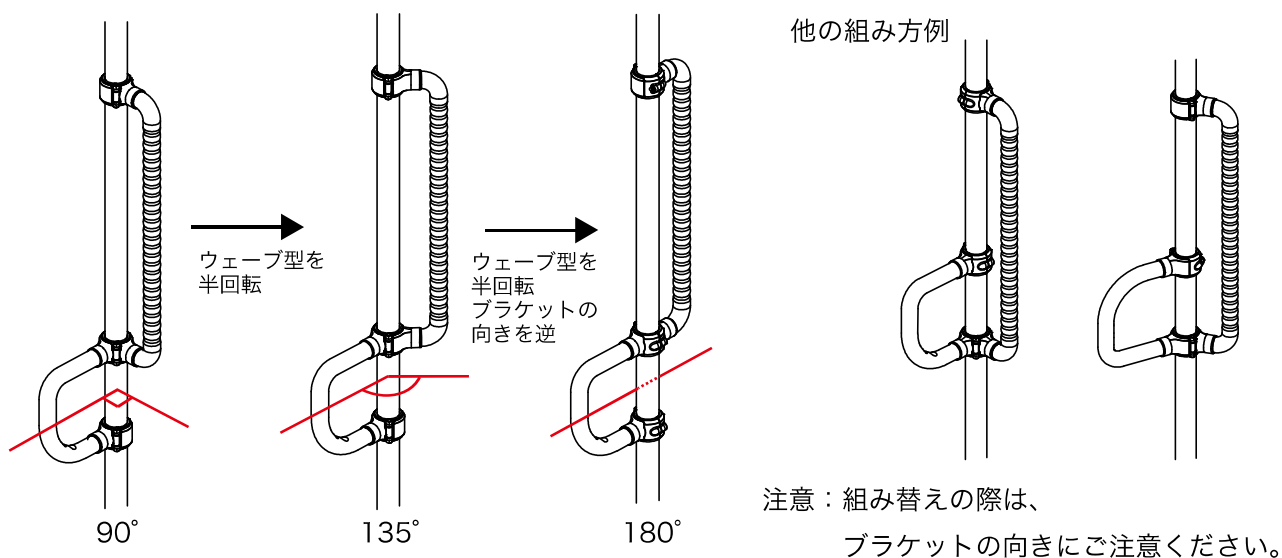

組み合わせ方 ウェーブ型ロング+ウェーブ型ロング

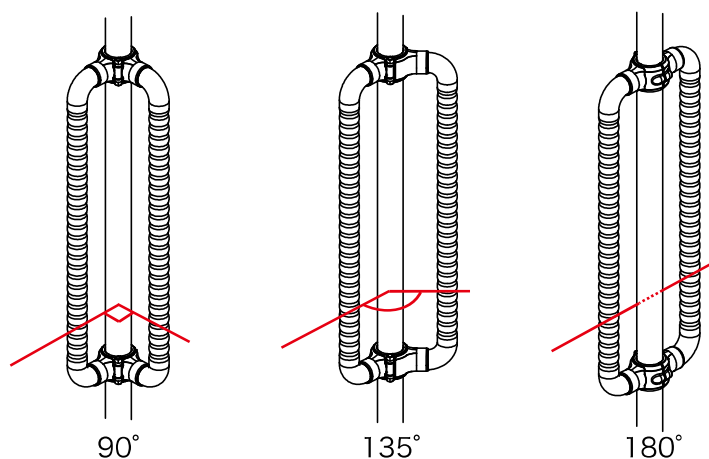

円型手すり・角型手すりの取り付け方法

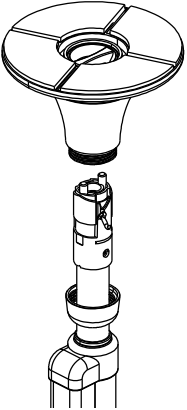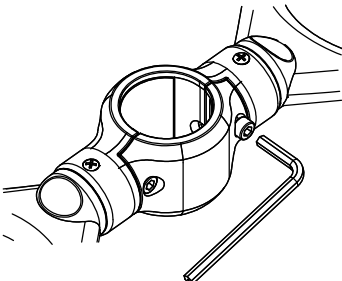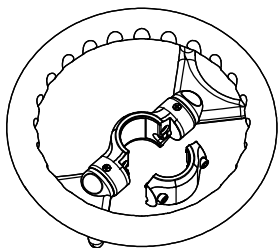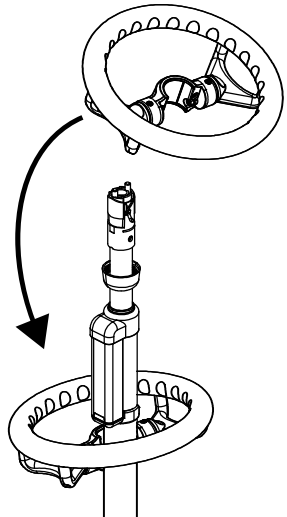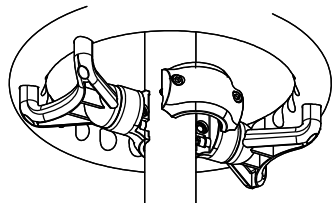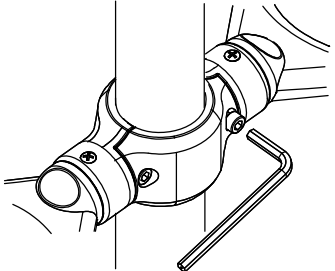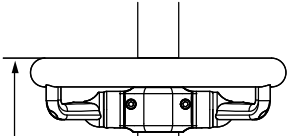- ① 本体の天井ベースを外します。

- ② ブラケットカバーのボルト (2ヶ所) を付属六角レンチで緩めてください。

- ③ ブラケットカバーを外します。

- ④ 本体の上から円型手すりを入れ、取り付けを行ってください。

- ⑤ 穴位置と合わせ、ボルトを真すぐに仮付けしてください。

- ⑥ 手すりの高さを調整し、六角レンチでボルトを※左右交互に締めてください。

- ⑦ 高さを変える場合は、ボルトを少し緩めて高さの調整を行ってください。


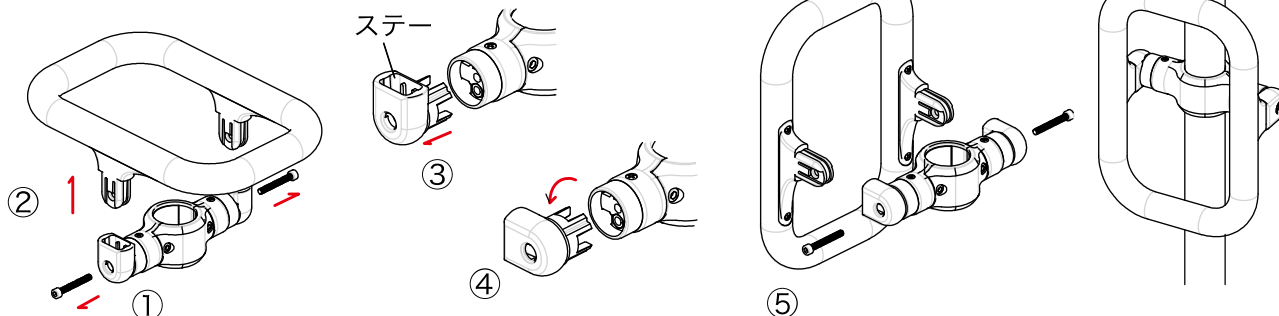


注意：ボルトの締めすぎには注意してください。ブラケットの破損につながります。

注意

角型手すり縦横組み替え方法

- ① 左右のキャップボルトを外し
- ② 手すり部を抜き外します。
- ③ 上向きステーを外し
- ④ 横方向に付け替えます。
- ⑤ 手すりを差し込み、キャップボルトで固定します。





円型手すり

BPZ-700V

仕様



手すり径	φ32
手すり部	木集成材
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	BPZ-700V
商品寸法	0.84kg(282×282×81.5)

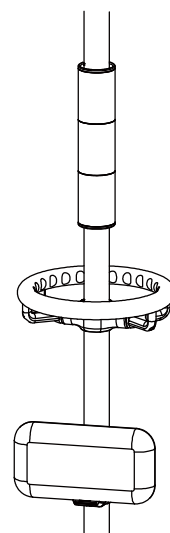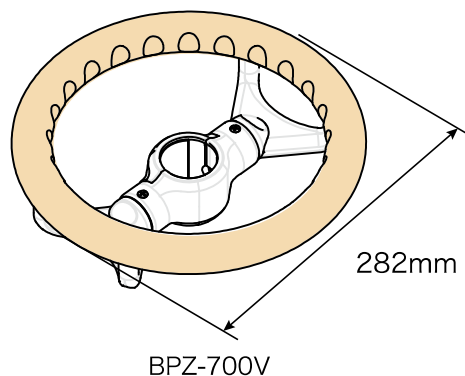

参考：クッションカバーを、立ち上がり・姿勢保持の際に、肩口が当たるように使用し、体幹のブレを抑制した動作補助が可能な組み合わせ。さらにプッシュ手すりと組み合わせで膝折れを防止する組み合わせが可能です。



角型手すり

BPZ-750V


仕様



手すり径	φ32
手すり部	木集成材
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	BPZ-750V
商品寸法	0.94kg(202×302×101)

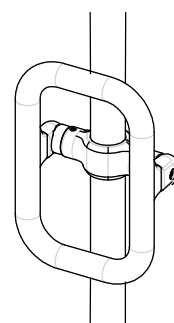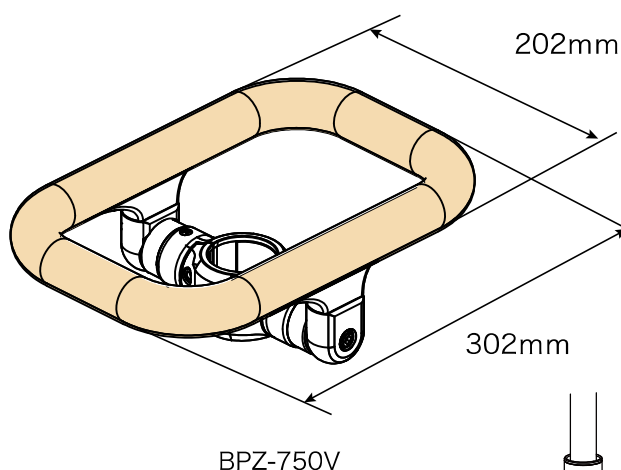

参考：オプションのクッションカバーと組み合わせると、体幹を安定させた姿勢保持や方向転換に効果的です。

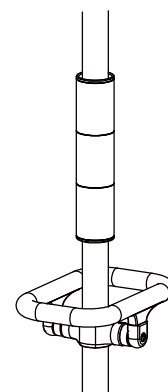


取扱上の注意

安全のため必ずお守りください。



滑り止めに傷やへたり、劣化などが見られる場合は、滑り止めを交換してください。本体の破損やブラケットの固定に問題が発生し、重大事故につながります。

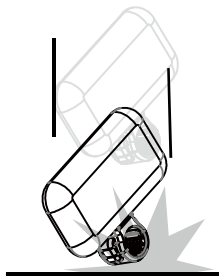


製品を落下させると、衝撃により破損する可能性があります。取り扱いに十分注意してください。



クッションが傷んで破れるなどした場合は、使用を止め、取り付け業者へ連絡をください。



取り外す際、ブラケットの滑り止めが外れにくい場合、強引に引っ張って外さないでください。破損や事故の原因となります。

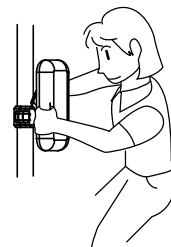

輸送時はベースポジ本体から外して下さい。付けたままの輸送は製品を傷め、破損の原因となります。



角度調整機構部がガタつく状態で使用しないでください。部品の破損や重大事故の原因となります。



手すりにぶら下がる・手すりを持ち上げるような使用は重大事故の原因となります。


手すりの取り付け手順

安全のため必ずお守りください。


- ① 5mm レンチで M6×25 のボルトを外します。
- ② ベスポジをブラケットで挟み込み、M6×25 のボルトを M5 レンチで交互に締めこみます。

注意：締め込み過ぎない

①

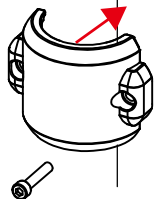

②

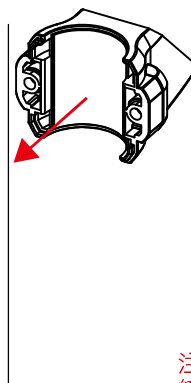

M6×25


注意：締めすぎや、片側のみを締めすぎると、破損の原因となります。

販売店・施工業者の方へ

- ブラケット内側の滑り止めは消耗品です。厚みが薄くなったり摩耗、汚れがある場合は交換してください。

交換用部材：

レール手すり用 滑り止め 8 枚入 / セット
SBR-700-80 定価 ¥2,800 (税別)

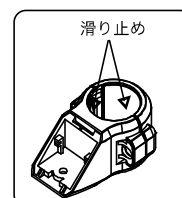


● プッシュ手すり

BPZ-400

仕様


手すり径	φ45 クッション外縁
手すり部	エラストマー
ブラケット	PA・アルミ
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	1.05kg
商品寸法	258×215×94.5

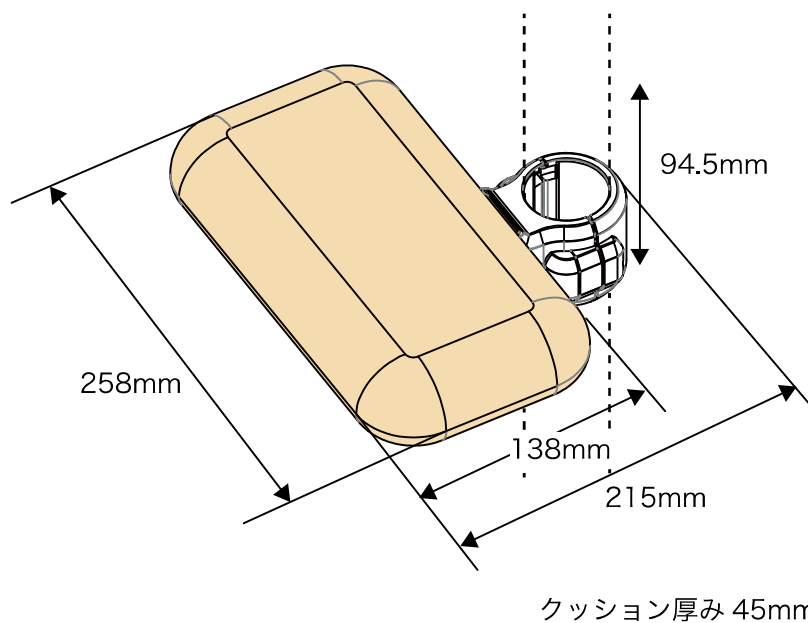

注意：手すりの組み替え方向により、寸法は異なります。

使用上の注意：低い位置への取付け、手すりを持ち上げる・引っ張り上げるような使用はしないでください。

クッションの組み合わせと組み替え方

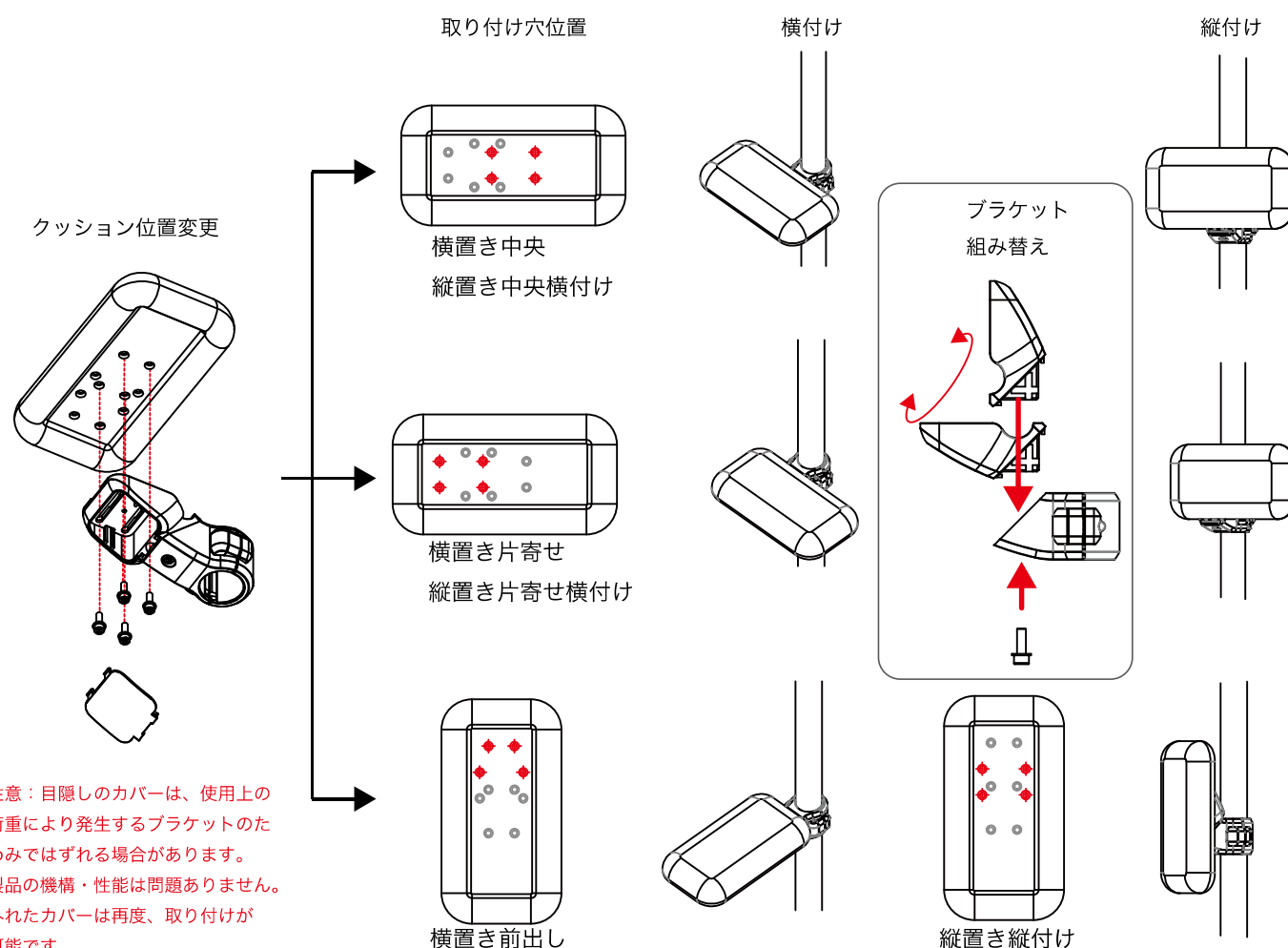


ティルト手すり

BPZ-410

仕様

手すり径	φ45 クッション外縁
手すり部	エラストマー
ブラケット	PA・アルミ
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	1.10kg
商品寸法	258×196×94.5

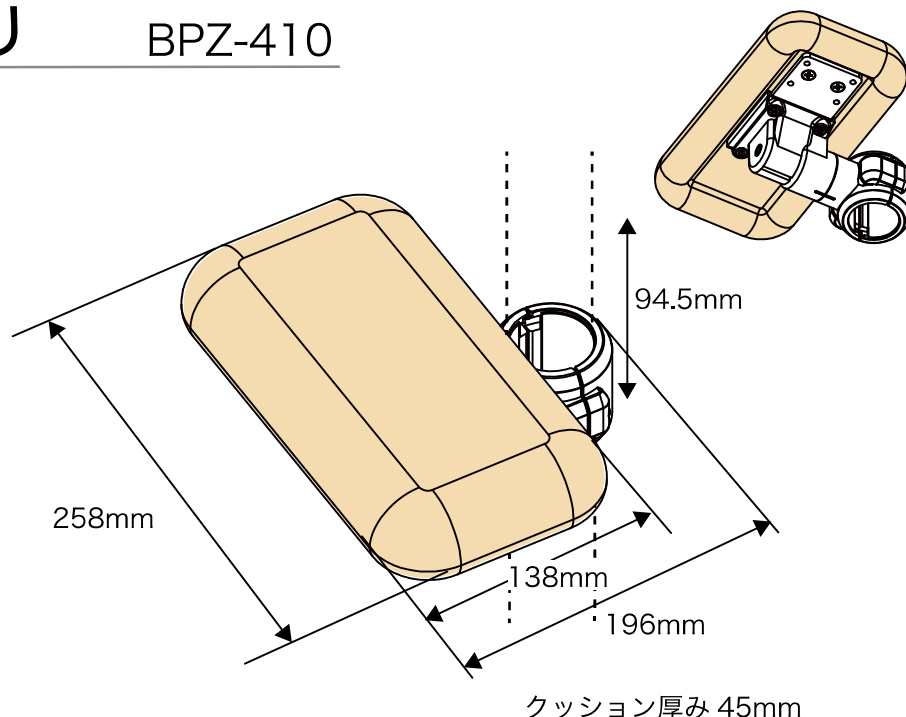

注意：手すりの組み替え方向により、寸法は異なります。

使用上の注意：低い位置への取付け、手すりを持ち上げる・引っ張り上げるような使用はしないでください。



クッションの組み方と取り付け方法

私用したい角度でソケットを差し込み、
M6×45 のボルトを締めて取り付けます。


角度調整の方法

正位置

(目印があっている時
クッションの面は床に平行)

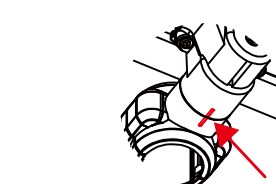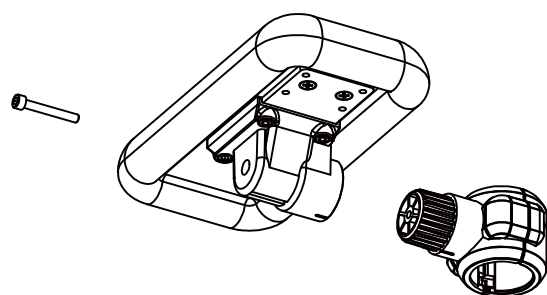


注意：完全にギアを抜かずに回そうとすると回転部の損傷など重大事故の原因につながります。

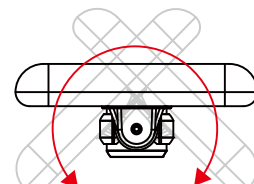

14.4° ずつ回転
(ブラケットを上下逆にした場合を含めると
7.2° 刻みに設定可能)

- ① 5mm レンチで M6×25 のボルトを外します。
- ② ベスポジをブラケットで挟み込み、M6×25 のボルトを M5 レンチで交互に締めこみます。

注意：締め込み過ぎない

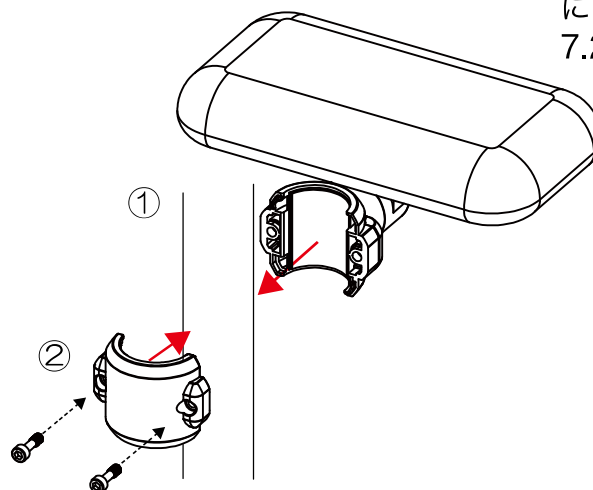



トリプル手すり

BPZ-320V




仕様

手すり径	φ35
手すり部	木集成材
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	BPZ-320V 1.55kg(208×185×650)
商品寸法	

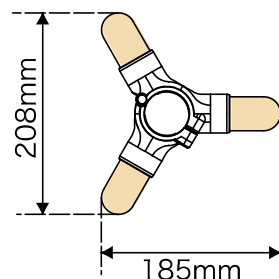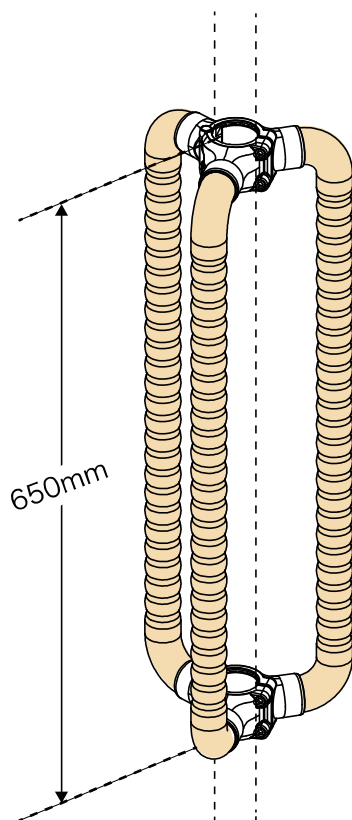

取り付け方

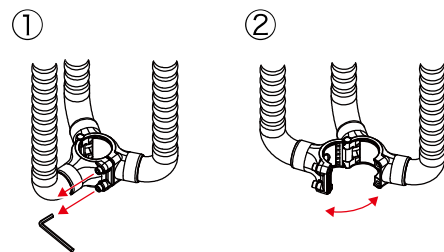

①
ブラケットの
ボルト2本を
緩める

②
ブラケットを開いて
パイプに取り付ける。
固定は①と②を逆に。

注意：ボルトは交互に締めてください。
締めすぎは破損の原因となります。



オフセット手すり

BPZ-330V




仕様

手すり径	φ35
手すり部	木集成材
ブラケット	PA
付属品	説明書・5mmレンチ
商品重量	BPZ-330V 0.67kg(168.5×142×400)
商品寸法	

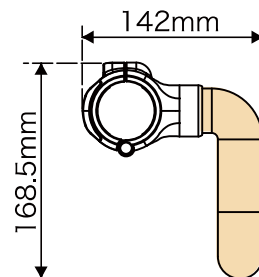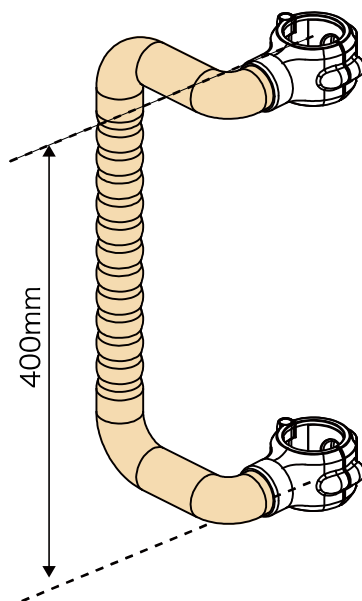

日常のお手入れ方法

- ①日常のお手入れは、柔らかい布を水またはぬるま湯に浸しよく絞って汚れをふき取り、その後、乾いた布で水分を十分ふき取ってください。
- ②汚れが目立つ場合は、柔らかい布に適量に薄めた中性洗剤を浸しよく絞って汚れをふき取った後、柔らかい布に水を浸しよく絞って洗剤分をふき取り、その後、乾いた布で水分を十分ふき取ってください。
- ③SIAA マーク部が汚れた場合、乾いた布で汚れをふき取ってください。

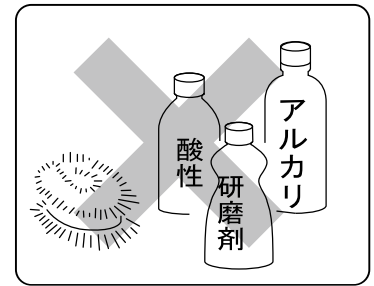

施工・貸与事業者様へ

製品をお引き渡しの前に、ご利用者への取扱説明は必ずおこなってください。
利用者が、取扱説明をご理解できない場合、また身体状況の変化等により理解・厳守が難しくなった場合は、ご利用を控えて下さい。

メモ書き

製品・施工関係問い合わせ
DIPPER ホクメイ株式会社

〒544-0001 大阪府大阪市生野区新今里 2-4-1
Tel.06-6752-0625 Fax .06-6758-6485

東京
Tel.03-5818-0621 Fax .03-5818-0624
名古屋
Tel.052-459-3004 Fax .052-453-1277
福岡
Tel.092-686-9300 Fax .092-686-9260

在庫・発送状況問い合わせ
DIPPER ホクメイ株式会社 受注センター

〒693-0043 島根県出雲市長浜町 516-46
Tel.0853-28-0521 Fax .0853-28-2128

■商品の仕様・説明書の内容は、予告なく変更する場合があります。

製造元 **ホクメイ株式会社**

総販売元 **DIPPERホクメイ株式会社**

URL <https://www.dipper-hokumei.co.jp>