


## 空間手すりシステム

# ベストポジションバー

BEST POSITION BAR ®

**NBP-100-80,81 NBP-100-90,91**

## 取扱説明書

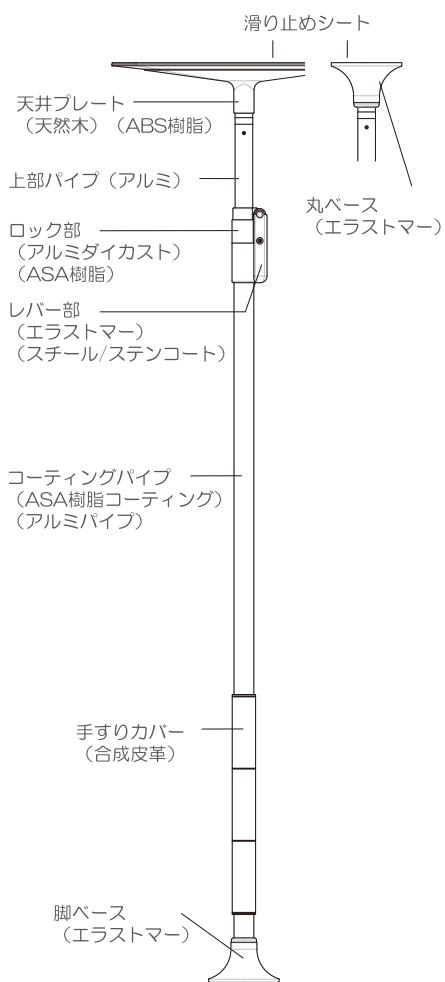

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。お読みになったあとは、いつも見られるところに大切に保管してください。

### 安全にお使いいただくために

- ◆製品の設置は必ず、指定事業者の方が行ってください。
- ◆取り扱いについて十分な説明を行った上でご利用者様にお渡しください。

## ☆安全上の注意 ◆安全のために必ずお守りください。

■この説明書は製品を、安全に正しくお使いいただき、事故や家財の損害を未然に防止するために、次のマークで表示しています。

■各マークの意味と内容を十分ご理解されたうえでご使用していただきますようお願いいたします。



警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性や物質損害が想定される」内容を示しています。

■お守りしていただく内容の種類を、次の絵表示で区分して説明しています。



禁止

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。



実行

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

# 使用上の注意




## 警 告

アームを無理やり回したり、横向  
向や上方向へ引っ張ったりしない  
でください。




本体が外れ転倒し、  
重大事故につなが  
ります。

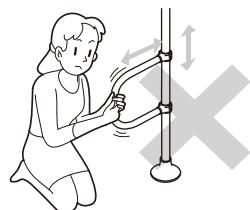

上方向への力は掛けないでください。




本体が外れ転倒し、重大事故  
につながります。

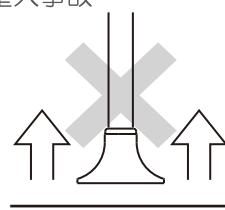

ベース部に飲み物等の水分がか  
からないようにしてください。




本体がずれたり、外れて転倒し、  
重大事故につながります。  
水分がかった場合は、  
十分に乾くまでご使用  
しないでください。

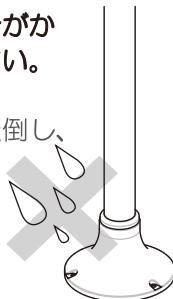

ぶつかったり蹴ったり、急激な衝撃は  
与えないでください。




本体が外れ転倒し、  
重大事故につなが  
ります。

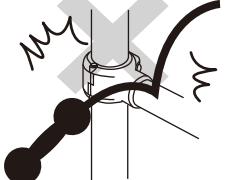

もたれかかったり、座ったり  
しないでください。




本体が外れたり、  
手すりが破損し、  
重大事故につな  
がります。

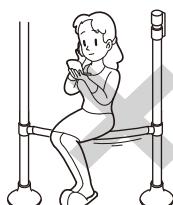

登ったり、ぶら下がったりしないで  
ください。




転落したり、手が  
滑ったり、また、  
本体が外れ転倒し、  
重大事故につなが  
ります。

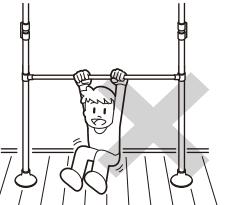

ストーブ等の火気類を近づけないで  
ください。




本体が変形したり、  
火災の原因にな  
ります。

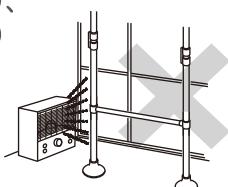

分解・改造はしないでください。



性能が低下し本体が  
ずれたり、外れて転  
倒し、重大事故  
につながります。

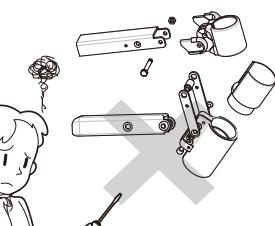

下部ベースに足を引っ掛けて  
本体やアームを引っ張る使用  
はしないでください。




本体が外れて転倒し、  
重大事故につながり  
ます。



ものをつるしたり、用途以外の使用  
はしないでください。



本体が外れて転倒し、  
重大事故につながり  
ます。

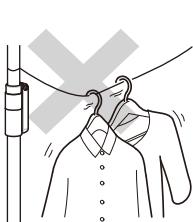

# 使用上の注意




## 警 告

手すりカバーを滑り止めとして使用しないで下さい。




手が滑り転倒し、重大事故につながります。アーム類や横手すりを取り付けてご使用ください。

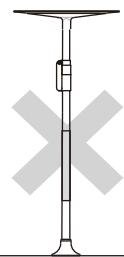

跳ね上げ手すりは開けたら必ず閉めてください。



跳ね上げた状態で使用しますと手すりが破損し重大事故につながります。

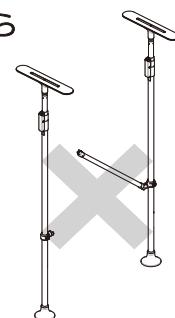

アーム類をご使用の際は、隙間に手や足、頭が入らないように十分注意してください。




隙間に入ると重大事故につながります。



ぬれた手で手すりをつかまないで下さい。




手が滑って転倒し、重大事故につながります。

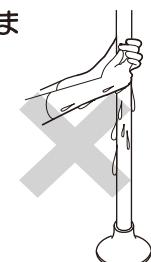

衣服が引っかかったり、ぶつかったり、下部ベースでつまずかないよう十分注意してください。



本体がずれたり、外れて転倒し、重大事故につながります。

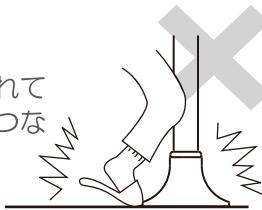

有機溶剤(シンナー、ベンジン等)や塩素系、アルカリ性、酸性洗浄剤等の使用はしないでください。スプレータイプの殺虫剤等を直接噴射しないでください。




樹脂部が変色、割れ等を起こし製品が破損し重大事故につながります。



利用者が自分の身体を安定させられない場合は介助者が付き添ってください。



転倒し、重大事故につながります。

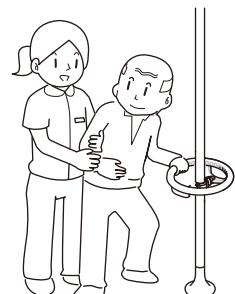

日常点検を必ず行ってください。




下のような現象が見られたら指定事業者に連絡してください。

- ① 黄色リボンが見えている
- ② まっすぐに立っていない
- ③ 固定ボルトが付いていない
- ④ 手すりが動く、ぐらつく

ご利用者による製品の設置、取り外しは行わないでください。



事故の原因となります。指定事業者に連絡してください。

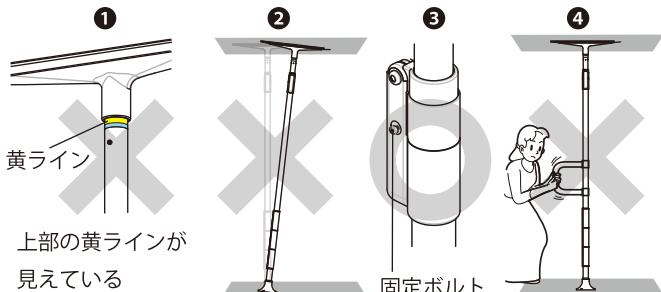

黄ライン  
上部の黄ラインが  
見えている

固定ボルト

## 製品の特長

「ベストポジションバー」を安全に取付け・ご使用していただくために！

ベストポジションバーとは、ベッドや布団などの寝具からの「起き上がり動作」また、座った状態からの「立ち上がり動作」や「移動動作」及び「移乗動作」などを補助する自立支援を目的とした福祉用具です。

天井と床の間を突っ張り、空間に取付けできる利点がありますが、ネジやクギで固定しないため、誤った取付けや使用をすると重大事故につながります。

- ◆使用上の警告・注意をよくお読みになり、「禁止事項」と「実行事項」を必ずお守りになり安全にご使用ください。
- ◆製品の取付けは必ず、指定事業者の方が行ってください。


## 日常点検

◆安全にご使用するため毎日点検してください。

黄色いリボンが隠れていますか？

は い → ○

いいえ → ×

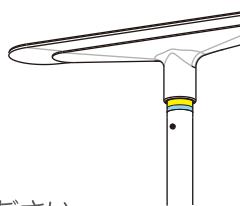


×は設置業者へ連絡してください。

真直ぐ立っていますか？

は い → ○

いいえ → ×

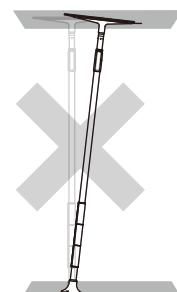

×は設置業者へ連絡してください。

固定ボルトは付いていますか？

は い → ○

いいえ → ×




×は設置業者へ連絡してください。

しっかりと固定されていますか？

は い → ○

いいえ → × (ぐらついている)

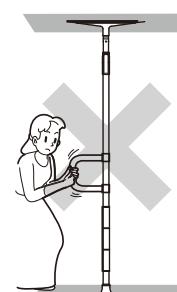

×は設置業者へ連絡してください。

## 日常のお手入れ

◆中性洗剤を使用してください。

●日常のお手入れは、柔らかい布を水またはぬるま湯に浸しよく絞って汚れをふき取り、その後、乾いた布で湿気を十分ふき取ってください。

●汚れが目立つ場合は、柔らかい布に適量に薄めた中性洗剤を浸しよく絞って汚れをふき取った後、柔らかい布に水を浸しよく絞って洗剤分をふき取り、その後、乾いた布で湿気を十分ふき取ってください。

