


ベスポジ-eで
立てる・座れる・歩ける

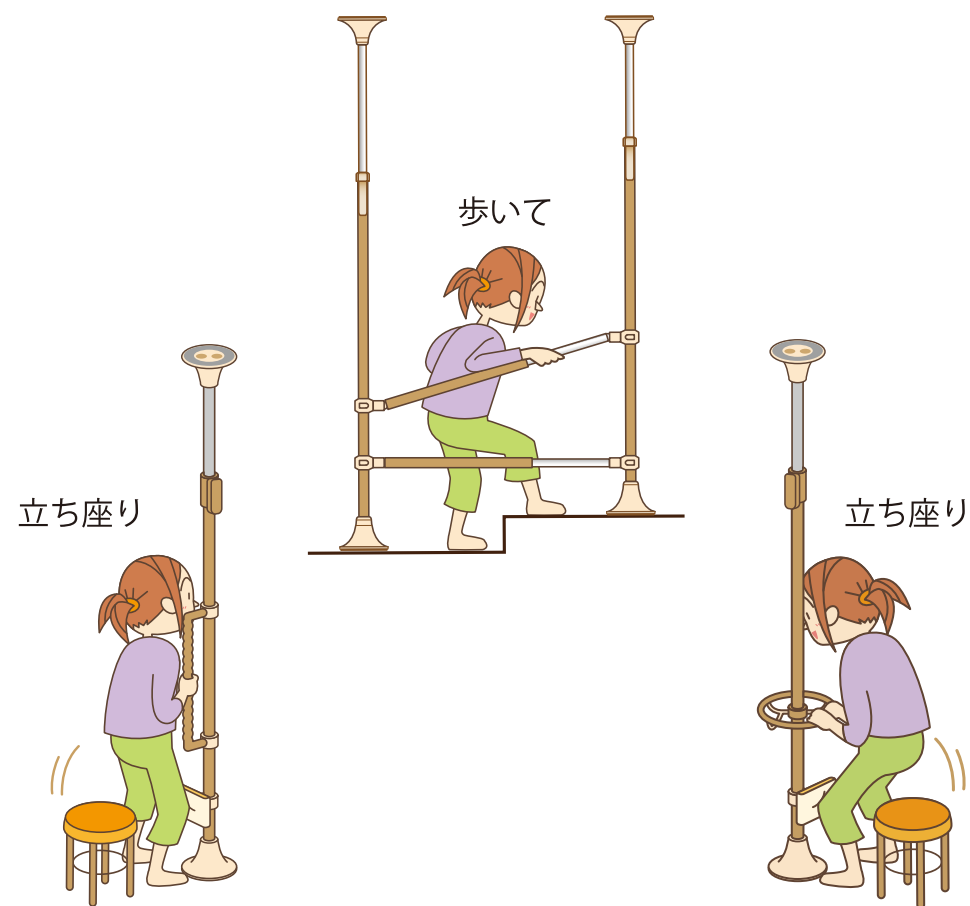

DIPPER ホクメイ 株式会社

本社：〒110-0015 東京都台東区東上野1-7-5 トップオントップス3F TEL (03) 5818-0621 (代) FAX (03) 5818-0624

ホームページ <http://www.dipper-hokumei.co.jp/>

■カタログの商品の仕様・価格は改良の為、予告なく変更する場合があります。■カタログの写真は印刷の為、多少実物とは色が異なります。

Web 版



DIPPER ホクメイ

PAT



レール 手すり

さらに支持しやすい
手すりに



伸縮 手すり

微妙な調整や
移設が簡単に



ベスポジ-eのサポートで 立ち座りから歩行動作まで 快適な生活を支えます。

POINT

1 取付がカンタン!



取り付け場所を決め、ロックレバーを解除し、上部パイプを伸ばし、天井にピッタリと付けます。



専用垂直器でベスポジ-eが垂直であることを確認し、固定レバーを下げます。



天井ベース下の赤ラインと天井ベースの確認窓の赤ラインが消えていることを確認します。



固定レバー下のレバーロックボタンを押し上げてロックします。確認窓に緑が見えている場合、負荷が強いので再度付け直してください。(解除が必要な場合は5mm六角レンチが必要です)

注意

- 赤ラインが消えていなければ、取り付け面が弱いか、突っ張り圧が弱いので再設置してください。
- 天井ベース確認窓に緑が出ると、天井に負荷がかかりすぎています。再設置してください。

POINT

2 組み合わせて使用できる

ブラケットがシステム化し、必要な機能のオプションを簡単に組み合わせながらベスポジ-eをつなげていくことが可能です。連続から横曲げ、縦曲げ、さらに不要な時は取り外すこともできます。



横へ連結



横から斜めへ連結



不要な時は取り外すこともできます。

POINT

3 耐水仕様もご用意

ベスポジ-eの基本セットは耐水仕様です。専用の耐水ベースに交換することで、水のかかる場所へ設置が可能です。伸縮手すりやグリップアーム-eと組み合わせることで、玄関ポーチやベランダ等でベスポジ-eをご活用いただけます。

※設置は乾いた状態で、しっかり清掃してから行ってください。



※浴室での使用はできません。



レール手すり

P.03

基本セット

P.05

伸縮手すり

P.07

H型セット

P.09

オプション品

P.15

手すりセット

P.25

ブラケット類

P.27

補修部品


P.29

レール手すりに腰や体幹を当てることで、歩行におけるふらつきを抑えることや、立位等の姿勢保持が可能です。また、横仕様に組み替えることで、手のひらや前腕部で支持しやすい手すりにすることが出来ます。



丸型天井ベースセット

メーカー希望 小売価格	¥139,700 (税込)	品番	TAISコード
1200mm	BPE-H71-120	00254-000344	

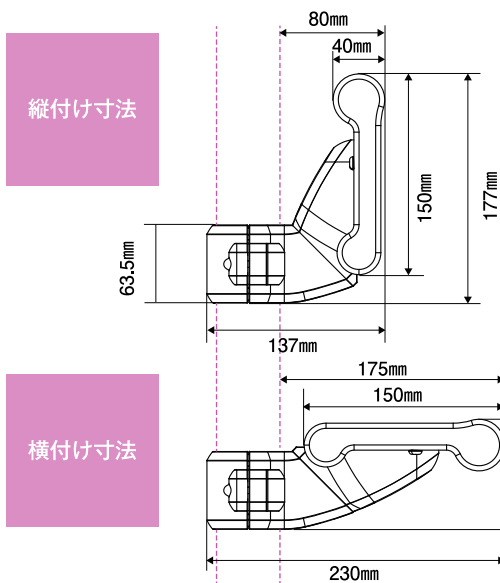

T型天井ベースセット

メーカー希望 小売価格	¥141,900 (税込)	品番	TAISコード
1200mm	BPE-H70-120	00254-000343	

■ レール手すり単品



レール手すり

メーカー希望 小売価格	¥40,700 (税込)	品番	TAISコード
BPE-300-80	00254-000342		

■ H型連結キャップセット




H型連結キャップセット

メーカー希望 小売価格	¥3,080 (税込)	品番	SBR-700-90
----------------	-------------	----	------------


縦仕様はレール手すりとして

腰・体幹を当て、体の動揺を抑える面手すりとして、歩行の安定化を促せます。

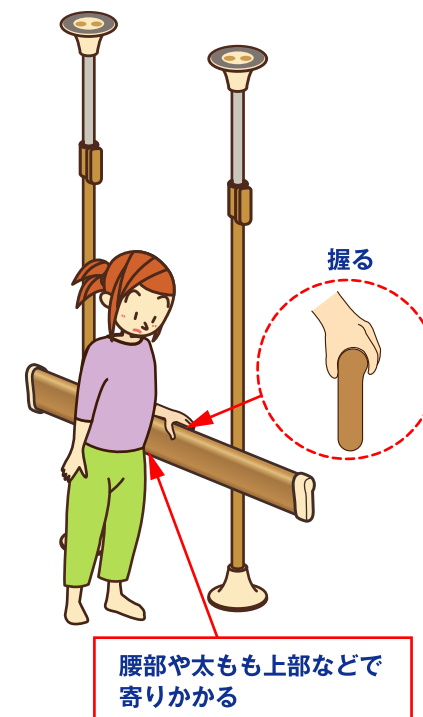


横仕様はプッシュ手すりとして

手のひらや前腕部などで上体を支持したり、立ち座りの際の引き込みによる力の逃がし方が可能です。

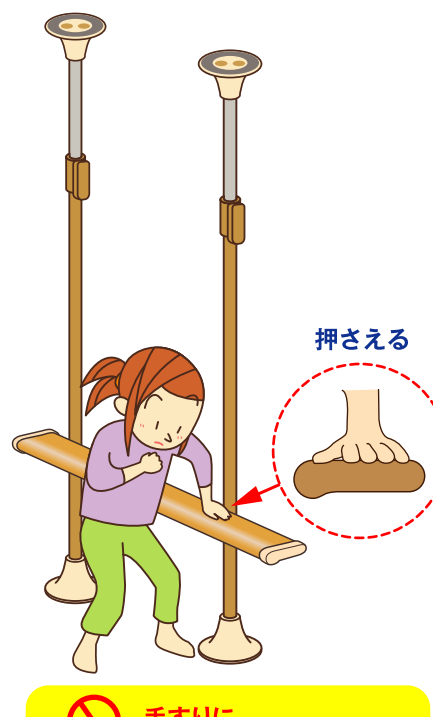

かんたん組み換え

手すりの差し替えて、縦横を簡単に組み替えられます。

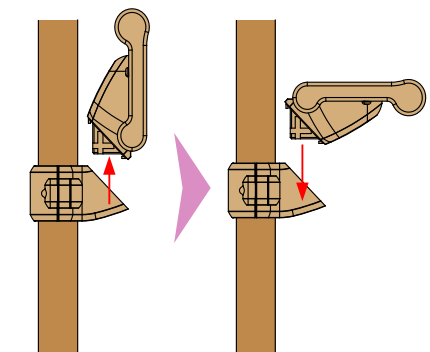

強度試験

レール手すり 荷重試験(強度試験)


ベストポジションとレール手すりをH型に組み、木手すりの最も弱い中央600mmの外縁を荷重するように試験機をまたぐ形で設置。木部1,200mmの中央を試験機にて1176N(120kgf)で荷重。荷重速度は10mm/minと100mm/minの速度で行う。(安全基準の400Nは80kgの人が利用した際の想定荷重値)

■ 試験結果

最大荷重値	破損・変形	ブラケット内部状態確認
120kgf(10mm/min)	無し	破損・変形・劣化の兆候無し
120kgf(100mm/min)	無し	破損・変形・劣化の兆候無し


※120kgf≒1176N

■ 試験イメージ

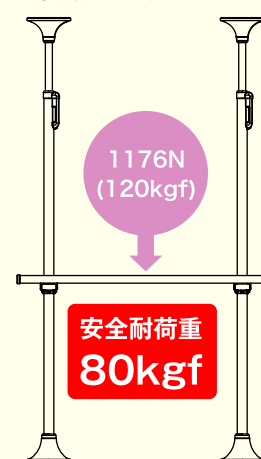

安全耐荷重
80kgf

バスポジe 基本セット(丸型天井ベース)

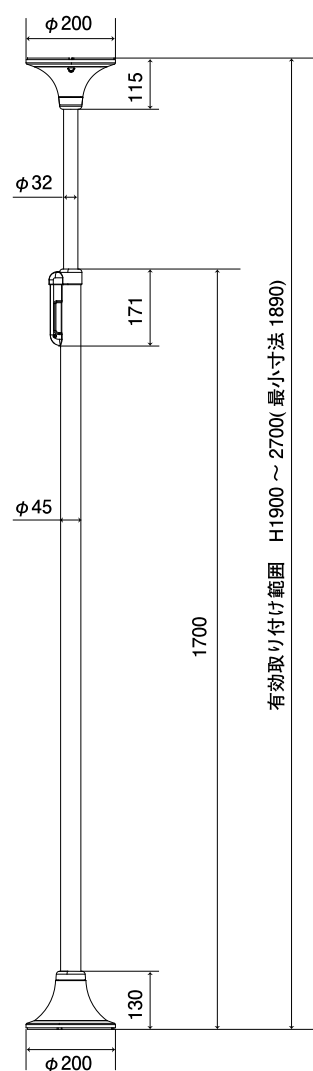

バスポジ-eの基本となる 支柱型手すりセット

天井に当てて、ロックレバーを下げるだけの簡単施工です。基本セットをつかんだり、身体を預けるだけでも手すりとして有効です。またオプションの手すりを組み合わせることで、様々な利用者の状況に対応し、活動範囲を広げることが可能となります。





基本セット(丸型天井ベース)

メーカー希望
小売価格 **¥49,500**(税込)

品 番	TAISコード
BPE-100-11	00254-000052

バスポジe 基本セット(T型天井ベース)

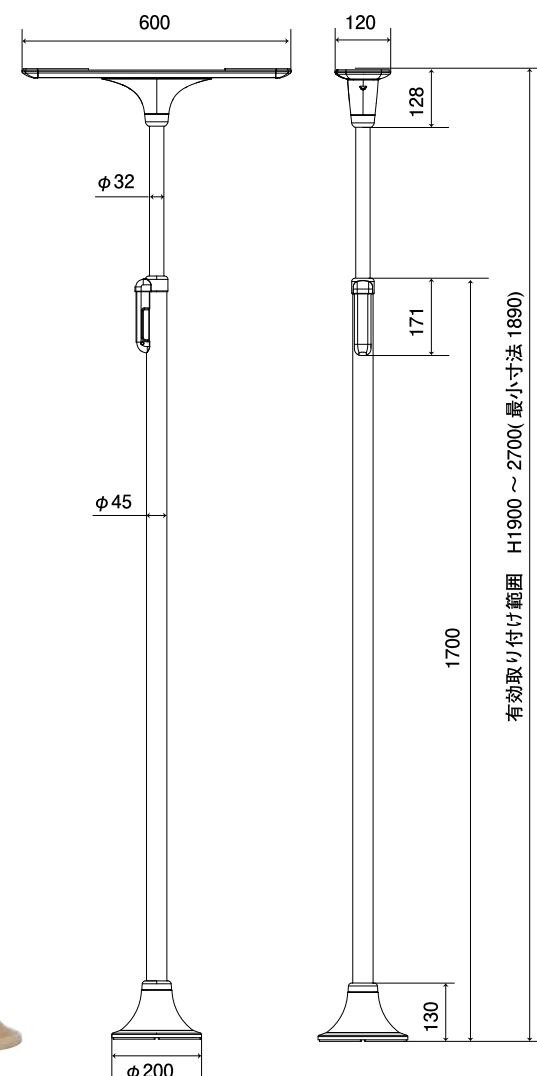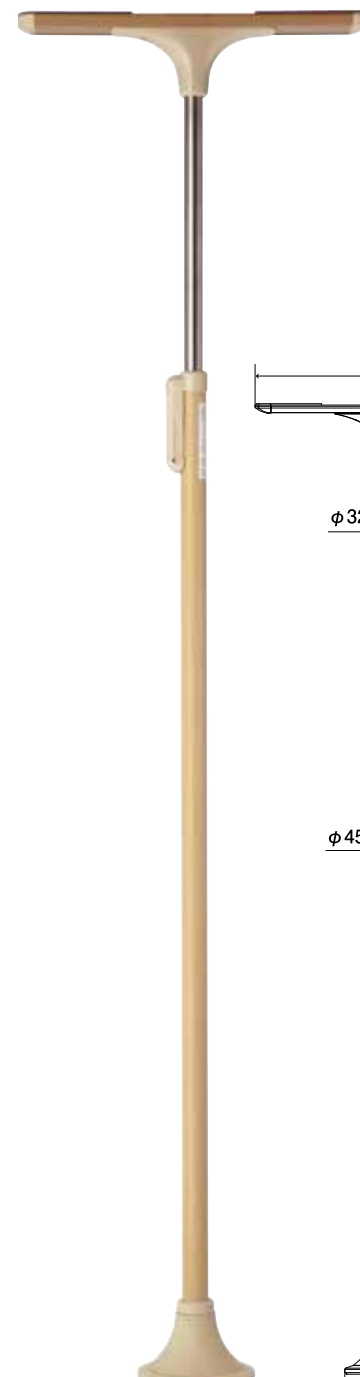

和室天井構造向けの 基本セット

T型天井ベースを、和天の竿にかけすることで、和室でもバスポジ-eの使用が可能となります。



基本セット(T型天井ベース)

メーカー希望
小売価格 **¥50,600**(税込)

品 番	TAISコード
BPE-100-10	00254-000051



耐水仕様

バスポジ-e基本セットの下部ベースを耐水ベースに交換することで、玄関ポーチ・ベランダ等の水や雨がかかる場所でも使用可能になります。 **※浴室での使用はできません。**

耐水ベース

メーカー希望
小売価格 **¥8,800**(税込)

品 番
BPE-100-90



基本セット丸型天井ベース耐水

メーカー希望
小売価格 **¥55,000**(税込)

品 番	TAISコード
BPE-100-81	00254-000053

※屋内用ベースは付属しません。



耐水仕様

T型天井ベースのタイプでも下部ベースを耐水ベースに交換することで、水の掛かる場所への取り付けも可能になります。 **※浴室での使用はできません。**

耐水ベース

メーカー希望
小売価格 **¥8,800**(税込)

品 番
BPE-100-90



基本セットT型天井ベース耐水

メーカー希望
小売価格 **¥56,100**(税込)

品 番	TAISコード
BPE-100-80	00254-000066

※屋内用ベースは付属しません。



手すりが無段階で伸びる、
微妙な距離の調整や移設も非常に簡単になりました。



カンタン調整

30cmの伸縮幅で容易に調整が可能です。

無段階調整

伸縮は無段階で必要な長さだけ調整が可能です。
(注意:伸縮幅30cm以内)

ロック機能

伸縮の固定は、六角レンチ1本で可能です。緩める際は左回りで緩め、ロックは右回りでクリック音が鳴るまで回せば固定ができます。



2種類の長さをご用意しました

■ 600～900mm
(実寸:515～815mm)




■ 900～1200mm
(実寸:815～1115mm)




● 下記のような場合に伸縮手すりであれば再設置が容易です。


手すりの勾配を緩くする為位置を少しずらしたい時や、框に踏み台を増やして手すりの位置を移動させたい時。

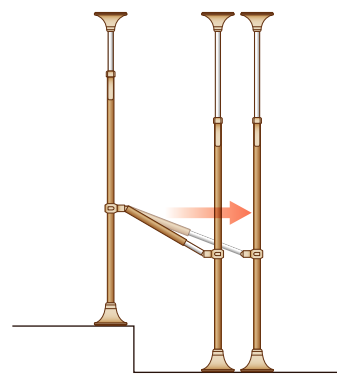

竿天井に天井ベースがうまく当たらない時の位置調整。

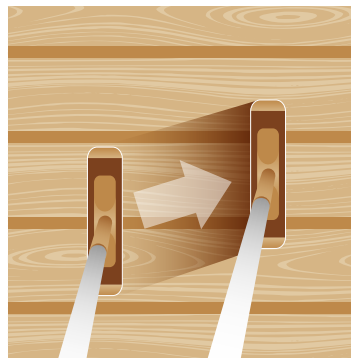

ポータブルトイレからトイレ利用へのADL向上などのレイアウト変更。

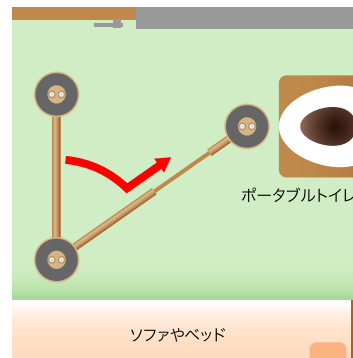

強度試験

伸縮手すり 785N(80kgf)・1176N(120kgf) 荷重試験

伸縮手すり1200サイズを用いて、H型に組み、ブラケット直と曲げの強度を計測する。
強度試験の方法は芯々1200mmの中央部を鉛直方向に荷重するものである。

■ 試験内容

試験機をまたぐ形で、H型固定伸縮1200とH型曲げ伸縮1200を取り付け、中心を荷重する。785N(80kgf)・1176N(120kgf)まで荷重し15秒ホールドする。


- 試験荷重値 : 80kgf・120kgf(荷重後15秒ホールド)
- 試験速度 : 手動
- 試験機 : オートグラフ AGS-50NX(島津製作所製)
- たわみ誤差 : 試験後手動にて荷重を下げ、負荷が0になり、復元時間として約5分どめる。

■ 試験結果

伸縮手すりの破損・変形無し。機構部分の不具合も無し。曲げブラケットのたわみ量が大いなのは、ブラケットの長さ100mmが加わり、ブラケットの構造上のたわみが加算されるため。

試料	最大荷重	最大たわみ量	復元たわみ誤差
曲げ	785N(80kgf)	23.8mm	3.6mm
	1176N(120kgf)	36.6mm	
固定	785N(80kgf)	16.7mm	2.5mm
	1176N(120kgf)	25.15mm	

■ 試験イメージ

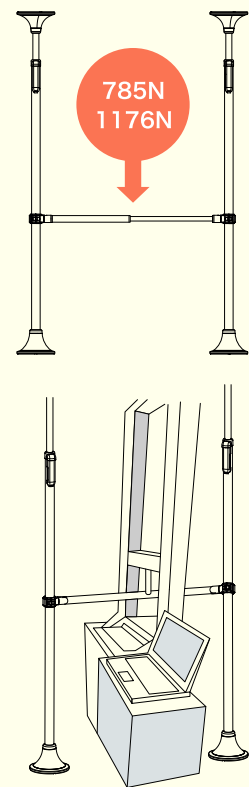


伸縮手すり 繰り返し荷重試験(疲労試験)

バスポジ-eと伸縮手すりをH型に組み、900～1200サイズの伸縮手すりを最長である1200mmに設定し、試験機をまたぐ形で設置する。芯々1200mmの中央を試験機にて400N(40kgf)での繰り返し荷重を行う。(400Nは80kgの人が利用した際の想定荷重値)
これを7年使用する想定25,550回を上回る、30,000回を目標に行う。検証は1,000回ごとに伸縮の動作確認を実施し、破損・変形がないことを確認する。10,000回ごとに、ブラケットを分解し、ブラケット樹脂に疲労劣化の兆候、破損・変形がないか確認する。

■ 試験結果

荷重回数	破損・変形	ブラケット内部状態確認
10,000回	無し	破損・変形・劣化の兆候無し
20,000回	無し	破損・変形・劣化の兆候無し
30,000回	無し	破損・変形・劣化の兆候無し

■ 試験イメージ

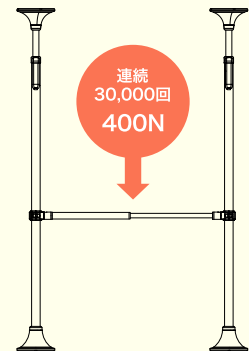

H型伸縮手すり 固定セット


立ち座り

歩 行

ベスポジ-e基本セットをストレートに連結した手すりです。

壁にとられない手すりにすることで、目的に最適な動線をつくることができます。

伸縮手すりで間隔の調整も容易です。

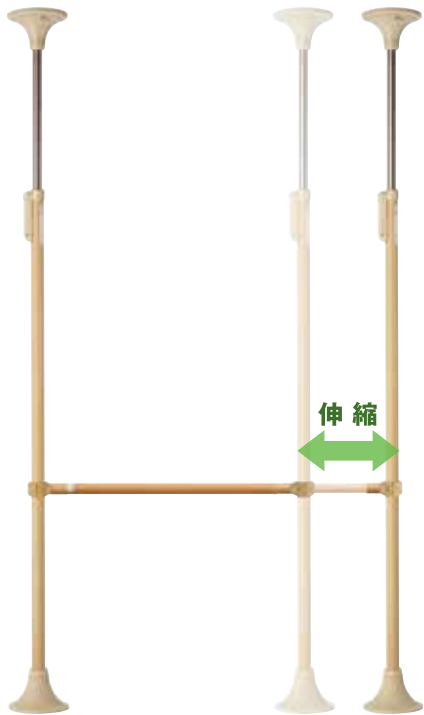

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥128,700** (税込)

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H51-609	00254-000175
900～1200mm	BPE-H51-912	00254-000176

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥130,900** (税込)

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H50-609	00254-000173
900～1200mm	BPE-H50-912	00254-000174



耐水仕様

下部ベースを耐水ベースに交換することで、玄関ポーチ・ベランダ等の水や雨がかかる場所でもベスポジ-eが使用可能になります。

※浴室での使用はできません。

耐水ベース

メーカー希望
小売価格 **¥8,800** (税込)

品 番
BPE-100-90



丸型天井ベースセット


メーカー希望
小売価格 **¥139,700** (税込)

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H81-609	00254-000183
900～1200mm	BPE-H81-912	00254-000184

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥141,900** (税込)

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H80-609	00254-000181
900～1200mm	BPE-H80-912	00254-000182

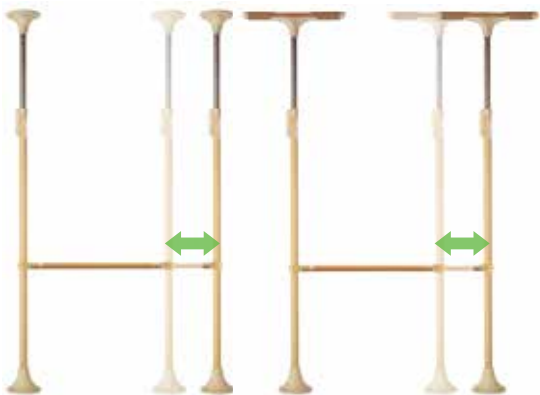

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

※屋内用ベースは付属しません。

H型伸縮手すり 曲げセット

立ち座り

歩 行

段 差

玄関など、段差があるところに対して手すりに角度をつけて連結できます。横曲げに組換えることで、

オフセット型や出端・入端などのコーナー部にも対応できます。伸縮手すりと組み合わせることで、

段差の間隔や、角度の変更による長さ変更も容易です。



丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥130,240** (税込)

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H61-609	00254-000179
900～1200mm	BPE-H61-912	00254-000180

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥132,440** (税込)

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H60-609	00254-000177
900～1200mm	BPE-H60-912	00254-000178



耐水仕様

T型天井ベースのタイプでも下部ベースを耐水ベースに交換することで、水の掛かる心配のある場所への取り付けも可能になります。

※浴室での使用はできません。

耐水ベース

メーカー希望
小売価格 **¥8,800** (税込)

品 番
BPE-100-90



丸型天井ベースセット


メーカー希望
小売価格 **¥141,240** (税込)

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H91-609	00254-000187
900～1200mm	BPE-H91-912	00254-000188

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥143,440** (税込)

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H90-609	00254-000185
900～1200mm	BPE-H90-912	00254-000186

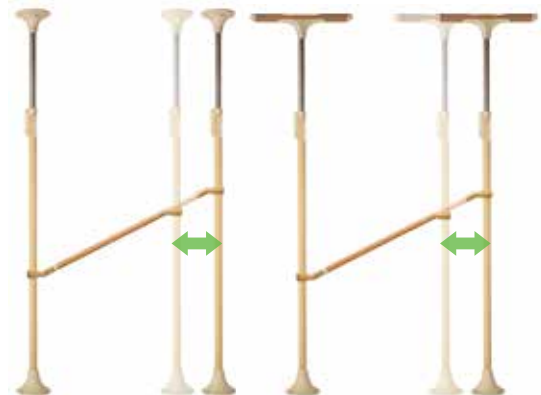

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

※屋内用ベースは付属しません。

H型木手すり 固定セット

立ち座り

歩 行

ベスポジ-e基本セットをストレートに連結した手すりです。

壁や家具にとらわれず自由に設置することができます。

H型セットは連結の基本になるセットで、これを延長したり他のブラケットを使用したりして個別の様々な状況に対応できるようになります。



丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥115,500** (税込)

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H11-060	00254-000097
900mm	BPE-H11-090	00254-000054
1200mm	BPE-H11-120	00254-000105

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥117,700** (税込)

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H10-060	00254-000081
900mm	BPE-H10-090	00254-000067
1200mm	BPE-H10-120	00254-000089

H型木手すり 曲げセット

立ち座り

歩 行

段 差

玄関など、段差があるところに対して手すりに角度をつけて連結できます。

横曲げに組換えることで、オフセット型や出端・入端にも対応できます。

POINT 用途に合わせて曲げの方向を変更できます

縦傾斜



● 階段等の段差のある場所

横傾斜



● 廊下の曲がり角 ● 部屋内の角 など



丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥117,040** (税込)

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H21-060	00254-000098
900mm	BPE-H21-090	00254-000055
1200mm	BPE-H21-120	00254-000106


T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥119,240** (税込)

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H20-060	00254-000082
900mm	BPE-H20-090	00254-000068
1200mm	BPE-H20-120	00254-000090



角や段差があっても問題なく設置

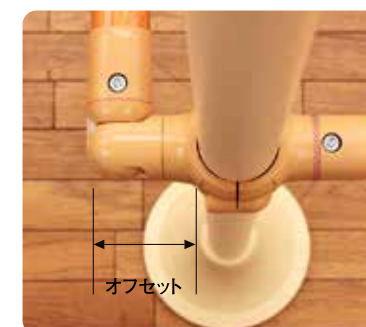

横曲げを利用したオフセット取り付け

H型木手すり 跳ね上げセット

立ち座り

歩 行

扉・押し入れ

ベスポジ-e基本セットをつなぐ手すりです。

手すりが跳ね上がることで、扉の前など、通行の制限を緩和できます。

手すりは、跳ね上げ時には軽く、下すときには抵抗がかかる安全仕様です。

壁にとられない手すりにすることで、目的に最適な動線をつくることができます。

POINT トルク機能



ヒンジ部は上げる時は軽く、
下げる時は抵抗が増し、重く動作する為、
上げた後に手すりが落ちてくる心配が
ありません。

トルク部



写真はウェーブ型手すりも併用

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥132,000** (税込)

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H31-060	00254-000099
900mm	BPE-H31-090	00254-000056
1200mm	BPE-H31-120	00254-000107

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥134,200** (税込)

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H30-060	00254-000083
900mm	BPE-H30-090	00254-000069
1200mm	BPE-H30-120	00254-000091



付属 手すりホルダー

手すりを跳ね上げておく際に、
手すりを固定する為のホルダー。



H型木手すり 取り外しセット

立ち座り

歩 行

扉・押し入れ

手すりを取り外すことができる連結手すりです。

押入れや屋内外をつなぐ時などに有効です。

POINT 取り外し機能



取り外しができるブラケットがついて
おり、不要なときは手すりを取り外せ
ます。



クローゼット前等で
手すりが不要な時は取り外すことができます。

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥118,800** (税込)

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H41-060	00254-000100
900mm	BPE-H41-090	00254-000057
1200mm	BPE-H41-120	00254-000108

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥121,000** (税込)

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H40-060	00254-000084
900mm	BPE-H40-090	00254-000070
1200mm	BPE-H40-120	00254-000092



付属 手すりホルダー

手すりを跳ね上げておく際に、
手すりを固定する為のホルダー。



円型手すり

オプション品

立ち座り

転回・移乗

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

立ち上がりから移乗動作において、移乗方向に制約がからず方向転換の際、手足の連動を生みやすくする手すりです。

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥77,000**(税込)

品番	TAISコード
BPE-S30-21	00254-000124

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥78,100**(税込)

品番	TAISコード
BPE-S30-20	00254-000123

使用手順

1



円型手すりの正面にふくらはぎの後ろにこぶし一つ分の余裕をもって座ります。

2



手すりをつかみ、引き込むように、上半身を前傾させて、腰を浮かせていきます。

3




円型手すりにかぶさるように掴み、膝を伸ばしていきます。

4



手すりをつかみ、引き込むように、膝を支点にして腰を浮かせていきます。

円型手すり単品

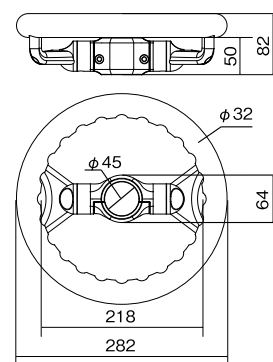

メーカー希望
小売価格 **¥27,500**(税込)

品番	TAISコード
BPE-300-20	00254-000131

角型手すり

オプション品

立ち座り

転回・移乗

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

ポールからの出幅を抑えつつ、縦、横、両手で支持できる縦向き、上から押さえ込んで使える横向きに組換え可能な手すりです。

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥77,000**(税込)

品番	TAISコード
BPE-S30-31	00254-000126

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥78,100**(税込)

品番	TAISコード
BPE-S30-30	00254-000125

使用手順

1



角型手すりの正面にふくらはぎの後ろにこぶし一つ分の余裕を持って座ります。

2



手すりをつかみ、前方へ引き込むように、上半身を前傾させていきます。

3




身体を手すりに引きつけるように上半身を前傾させ、腰を浮かせていきます。

4



手すりをつかんだまま上半身をプッシュアップし、膝を伸ばし立位をとります。


角型手すり単品

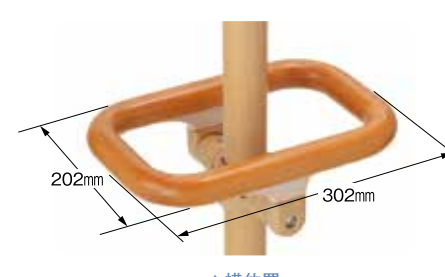

▲横位置



▲縦位置

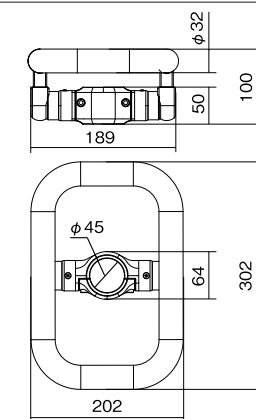

メーカー希望
小売価格 **¥27,500**(税込)

品番	TAISコード
BPE-300-30	00254-000132

膝当て手すり

オプション品

立ち座り

立位保持

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

立ち座りの動作や立位保持の際に、膝崩れしてしまう場合等に膝を当てることで、予防することができ、介助量の負担軽減につながります。
また、腰部や胸部で支えることで、姿勢保持にも、利用できます。

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥71,500**(税込)

品 番	TAISコード
BPE-S20-11	00254-000076

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥72,600**(税込)

品 番	TAISコード
BPE-S20-10	00254-000075

使用手順

1



端座位で座り、健側の膝を膝当てに当てます。

2



手すりもしくは支柱をつかみ、膝を支点にして上半身を前傾させて腰を浮かせていきます。

3



支柱に肩を当てるようにしながら上体を上げていきます。この時、膝は膝当てに付けたままです。

4



上体を伸ばし、立位を取ります。立位の際、膝の動揺がある場合、そのまま膝当てに膝を当て動揺を抑えながら立位を維持します。


膝当て手すり単品



▲横取り付け



▲縦取り付け

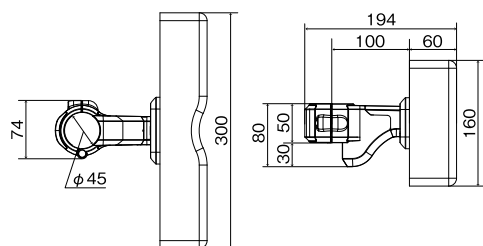

メーカー希望
小売価格 **¥22,000**(税込)

品 番	TAISコード
BPE-200-10	00254-000127

肘置き手すり

オプション品

立ち座り

立位保持

リウマチ

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

前腕部で支持することで、立ち座りや姿勢保持をサポートする手すりです。
リウマチなど握ることが困難な場合等にも有効です。
前腕部の左右への動揺を抑える形状になっていることで、上体の安定をとるのに有効です。

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥71,500**(税込)

品 番	TAISコード
BPE-S20-21	00254-000078

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥72,600**(税込)

品 番	TAISコード
BPE-S20-20	00254-000077

使用手順

1



肘置きを斜め前に使用者の矢状面と平行になるように座ります。

2



肘置きに手と腕をのせ、上半身を安定させます。

3




肘置き手すり前方を手で押さえながら、上半身を前傾していき、腰を浮かせます。

4



手のひらでプッシュアップしていき、上半身を起こしながら立位をとります。

肘置き手すり単品

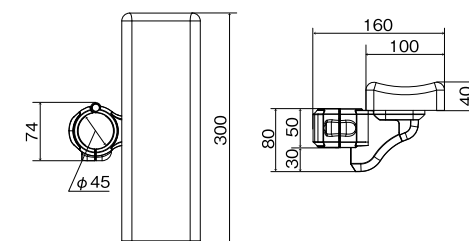

メーカー希望
小売価格 **¥22,000**(税込)

品 番	TAISコード
BPE-200-20	00254-000128

レール手すり

基本セット

伸縮手すり

H型セット

オプション品

手すりセット

フックセット類

補修部品

レール手すり

基本セット

伸縮手すり

H型セット

オプション品

手すりセット

フックセット類

補修部品

プッシュ手すり

オプション品

立ち座り

リウマチ

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

手のひらで押さえ込んで使用する手すりです。

上体の持ち上げ動作や手のひらでの姿勢保持に有効です。

床からの立ち上がり時は、膝くらいの高さに付けると効果的です。

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥66,000**(税込)

品番	TAISコード
BPE-S20-31	00254-000080

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥67,100**(税込)

品番	TAISコード
BPE-S20-30	00254-000079

使用手順

1



プッシュ手すりを自分の利き手の横少し前にして座ります。

2



手のひらで手すりを押さえるようにして体重を乗せ、身体を安定させます。

3





手のひらでプッシュアップするように上半身を持ち上げていきます。

4



腕を伸ばして、上半身を起こすと同時に膝を伸ばし、立位をとっていきます。

プッシュ手すり単品

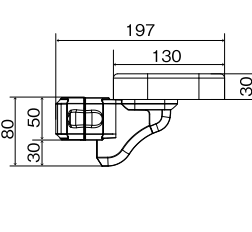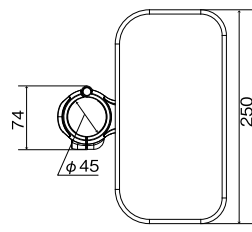

メーカー希望
小売価格 **¥16,500**(税込)

品番	TAISコード
BPE-200-30	00254-000129

ウェーブ型手すり

オプション品

立ち座り

転回・移乗

グリップ部をウェーブ状にすることで、握り込みやすく滑りにくい手すりです。

立ち座りや、段差の昇降などの動きをサポートします。

標準とロングの2種の長さがあります。



ウェーブ型手すりロング
丸型天井ベースセット

ウェーブ型手すり
T型天井ベースセット

T型天井ベースも
選べます

丸型天井ベースも
選べます

標準
サイズ

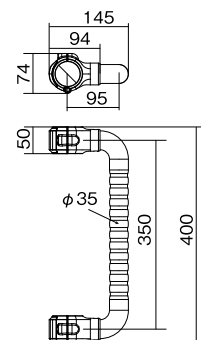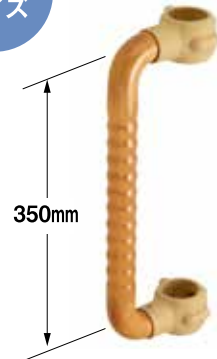

標準サイズセット品価格

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥63,800**(税込)

品番	TAISコード
BPE-S30-11	00254-000122

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥64,900**(税込)

品番	TAISコード
BPE-S30-10	00254-000121



ウェーブ型手すり単品価格

ウェーブ型手すり単品

メーカー希望
小売価格 **¥14,300**(税込)

品番	TAISコード
BPE-300-10	00254-000130

ロング
サイズ

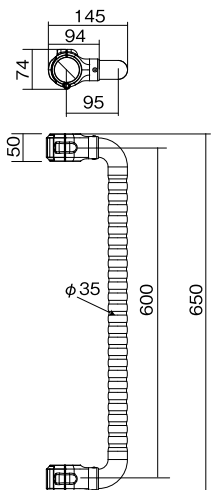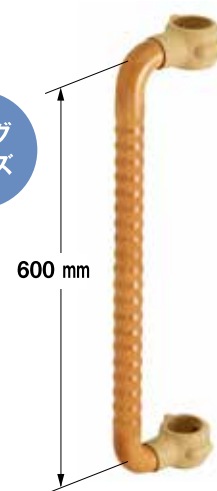

ロングサイズセット品価格

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥64,900**(税込)

品番	TAISコード
BPE-S30-41	00254-000135

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥66,000**(税込)

品番	TAISコード
BPE-S30-40	00254-000134

ウェーブ型手すりロング単品

メーカー希望
小売価格 **¥15,400**(税込)


品番	TAISコード
BPE-300-40	00254-000133

握り部に凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すりです。

トイレや玄関ポーチ・ベランダなどに有効です。

ショートタイプの3P・ロングタイプの5P・傾斜タイプの5P斜の3種があります。


基本セット
丸型天井ベース

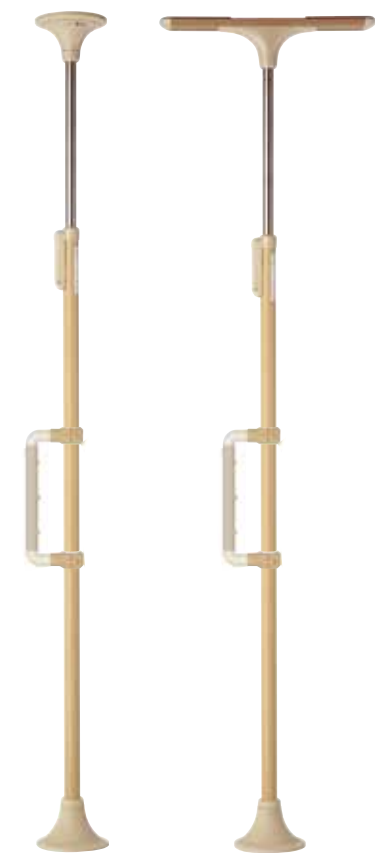


基本セット
T型天井ベース




3P

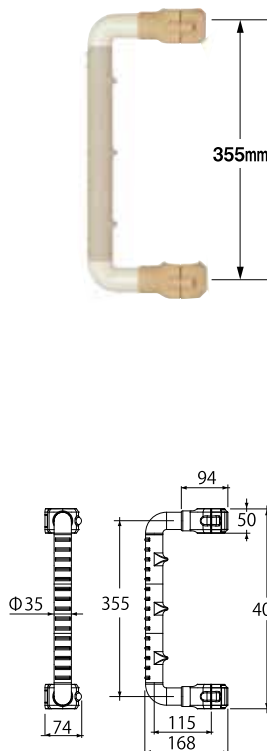

5P

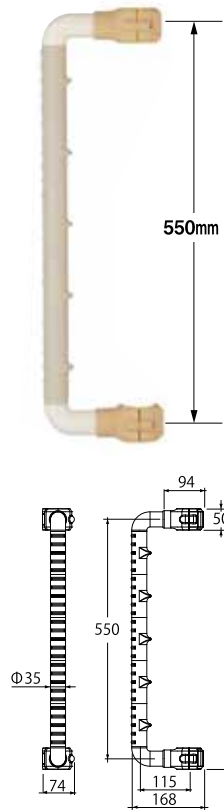

5P斜

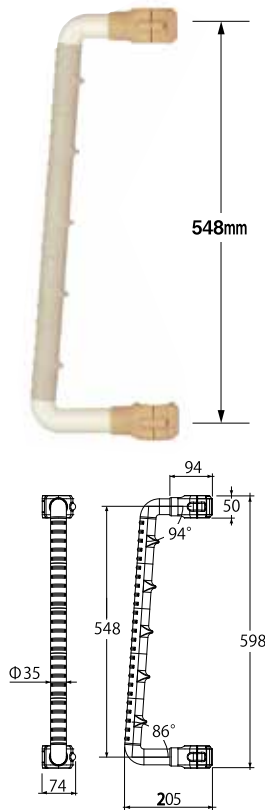

3Pセット品価格

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥69,300** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S30-71	00254-000141

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥70,400** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S30-70	00254-000140

5Pセット品価格

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥71,500** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S30-61	00254-000139

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥72,600** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S30-60	00254-000138

5P斜セット品価格

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥71,500** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S30-51	00254-000137

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥72,600** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S30-50	00254-000136

グリップアーム-e単品価格

グリップアーム-e 3P単品

メーカー希望
小売価格 **¥19,800** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-300-70	00254-000144

グリップアーム-e 5P単品

メーカー希望
小売価格 **¥22,000** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-300-60	00254-000143

グリップアーム-e 5P斜単品

メーカー希望
小売価格 **¥22,000** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-300-50	00254-000142


基本セット 耐水
丸型天井ベース




基本セット 耐水
T型天井ベース




3P

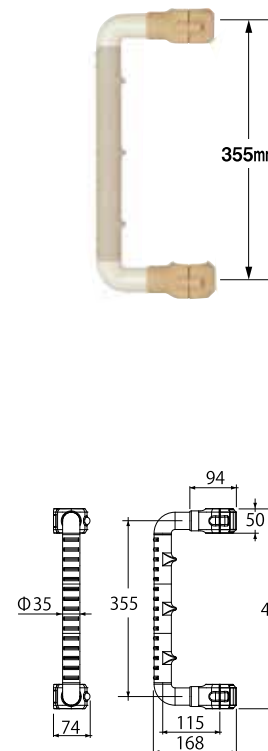

5P

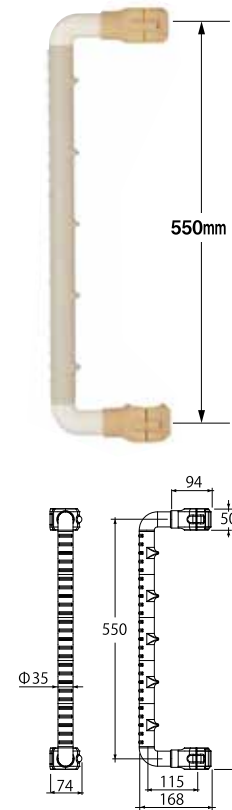

5P斜

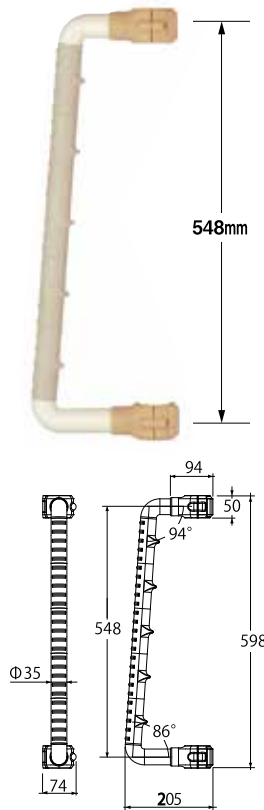

3Pセット品価格

丸型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥74,800** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S80-71	00254-000150

T型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥75,900** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S80-70	00254-000149

5Pセット品価格

丸型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥77,000** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S80-61	00254-000148

T型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥78,100** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S80-60	00254-000147

5P斜セット品価格

丸型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥77,000** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S80-51	00254-000146

T型天井ベースセット耐水


メーカー希望
小売価格 **¥78,100** (税込)

品 番	TAISコード
BPE-S80-50	00254-000145

※浴室での使用はできません。

玄関等段差のあるところにスペースを有効に使える、出幅のコンパクトな手すりです。
特殊なシリコーン滑止めを使用していることで、横ズレに強い耐性があります。
高位差のある段差では、横向きに降りることで膝にかかる負担をより軽減することが可能です。

玄関アーム レギュラー

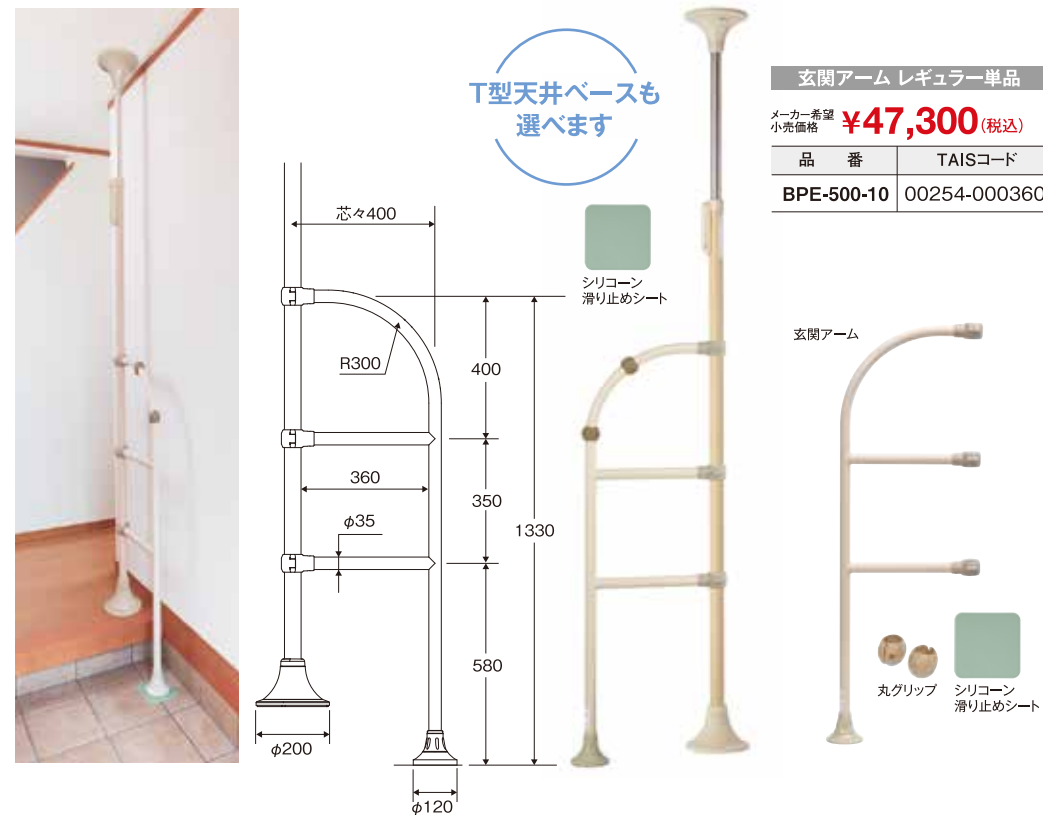

玄関アーム レギュラー単品	
メーカー希望 小売価格	¥47,300 (税込)
品番	TAISコード
BPE-500-10	00254-000360

セット

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥96,800** (税込)


品番	TAISコード
BPE-S40-11	00254-000152

T型天井ベースセット	
メーカー希望 小売価格	¥97,900 (税込)
品番	TAISコード
BPE-S40-10	00254-000151

 防水仕様 丸型天井ベースセット	
メーカー希望 小売価格	¥102,300 (税込)
品番	TAISコード
BPE-S80-81	00254-000156

 耐水仕様 T型天井ベースセット	
メーカー希望 小売価格	¥103,400 (税込)
品番	TAISコード
BPE-S80-80	00254-000155

玄関アーム ショート

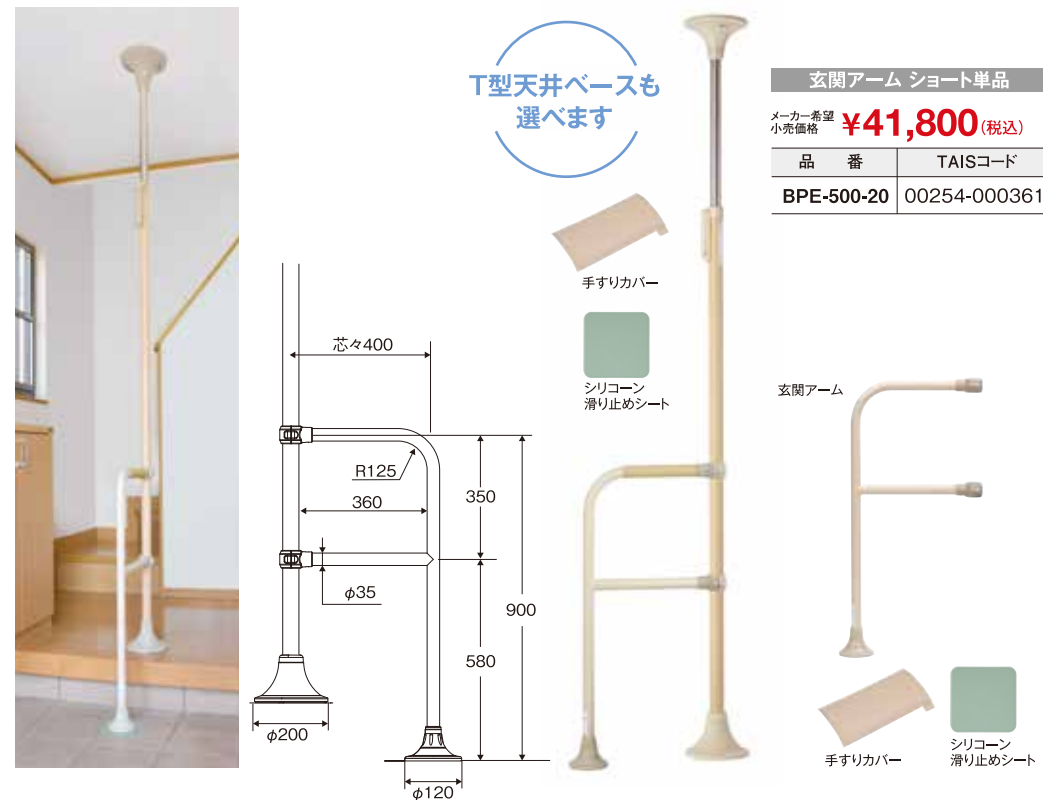

メーカー希望 小売価格	
¥41,800 (税込)	
品番	TAISコード
BPE-500-20	00254-000361

セット	
丸型天井ベースセット	
メーカー希望 小売価格	¥91,300 (税込)
品番	TAISコード
BPE-S40-21	00254-000154

T型天井ベースセット	
メーカー希望 小売価格	¥92,400 (税込)
品 番	TAISコード
BPE-S40-20	00254-000153

 耐水仕様 丸型天井ベースセット	
メーカー希望 小売価格	¥96,800 (税込)
品番	TAISコード
BPE-S80-91	00254-000158


 耐水仕様 T型天井ベースセット	
メーカー希望 小売価格	¥97,900 (税込)
品番	TAISコード
BPE-S80-90	00254-000157

オプションの適用例

オプション手すりの選択の
参考にしてください


膝当て手すり

- ① 膝の動揺があり、下半身が不安定な人
- ② 筋力の低下があり、身体の姿勢保持力が弱い人
- ③ 体力がなく、同じ姿勢の保持が難しい人
- ④ 疾患などにより片麻痺や筋力低下があり身体のバランスが良くない人
- ⑤ 補助が必要だが、自力もしくは可能な限り自力で(簡易な補徐のみで)立ち座り動作を行いたい人、移乗動作を目的とする人

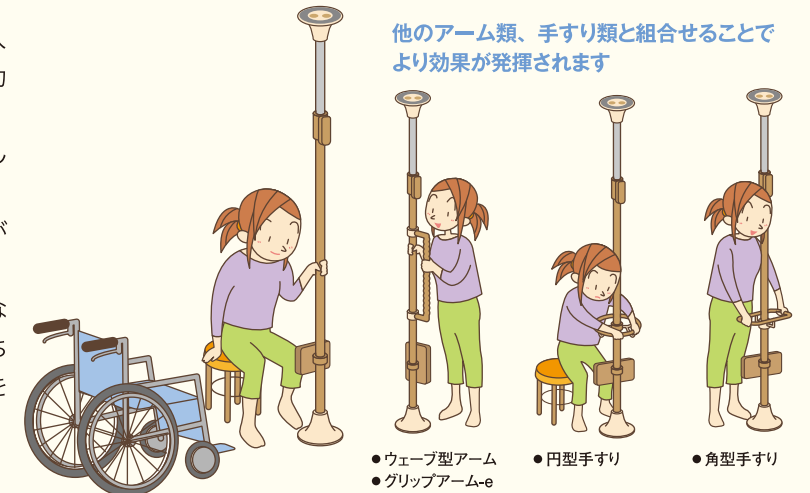


肘置き手すり・プッシュ手すり

- ① 立位から座位・座位から立位といった不安定な動作時の身体
の支持が必要な人
- ② 立位動作の前方へ・着座の後方への重心移動の誘導が必要な人
- ③ リウマチなどで、握りが弱く、平手を用いて支持したい人
- ④ 前傾姿勢の保持・誘導が必要な人(トイレ動作・端座位への移動
など)
- ⑤ プッシュアップ動作の必要な人
- ⑥ 手のひらもしくは前腕で身体を支持し座位耐久性を向上させ
たい人

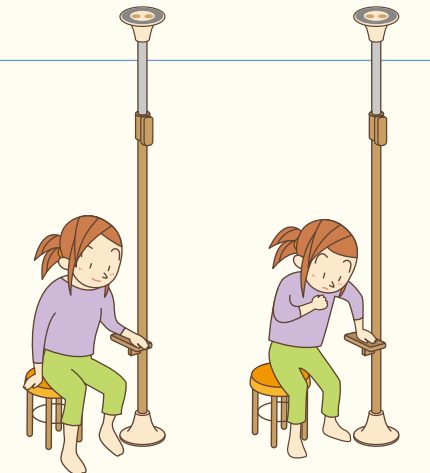

円型手すり・角型手すり

- ①前傾姿勢への引き込みが必要な人
- ②骨盤後傾による前傾姿勢が不十分な人
- ③立位動作の際、両手によるプッシュアップ動作が必要な人
- ④方向転換の際の支持が必要な人
- ⑤立位保持を自力で行い補助が必要な人
- ⑥前方支持や斜め前方向転換支持の必要な人
- ⑦補助は必要だが、立位保持を自力で出来る事が目的の方

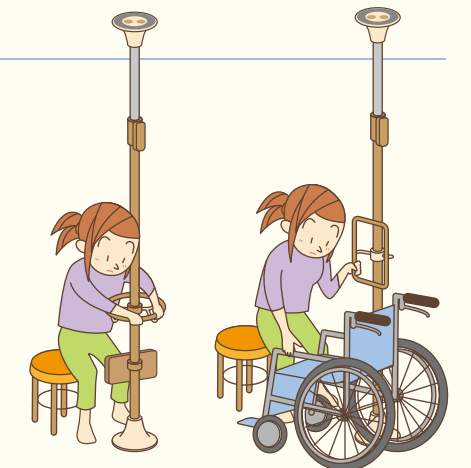

基本セットに取り付けて使用する手すりのセットです

伸縮手すり

立ち座り

歩行

■600～900mm (実寸:515～815mm)



■900～1200mm (実寸:815～1115mm)



メーカー希望
小売価格 **¥22,000** (税込)

	品番
600～900mm	SBR-600-609
900～1200mm	SBR-600-912

システム伸縮手すり固定セット

立ち座り

歩行

■600～900mm (芯々:600～900mm)



■900～1200mm (芯々:900～1200mm)



メーカー希望
小売価格 **¥29,700** (税込)

	品番	TAISコード
600～900mm	SBR-30-609	00254-000169
900～1200mm	SBR-30-912	00254-000170

システム伸縮手すり曲げセット

立ち座り

歩行

段差

■600～900mm
(芯々:700～1000mm)



■900～1200mm
(芯々:1000～1300mm)



メーカー希望
小売価格 **¥31,240** (税込)

	品番	TAISコード
600～900mm	SBR-40-609	00254-000171
900～1200mm	SBR-40-912	00254-000172

システム木手すり 標準タイプ

■600mm (木部:460mm / 実寸:514mm)



■900mm (木部:760mm / 実寸:814mm)



■1200mm (木部:1060mm / 実寸:1114mm)



メーカー希望
小売価格 **¥8,800** (税込)

	品番
600mm	SBR-200-060
900mm	SBR-200-090
1200mm	SBR-200-120

システム木手すり 固定セット

立ち座り

歩行

■600mm (芯々:600mm)



■900mm (芯々:900mm)



■1200mm (芯々:1200mm)



メーカー希望
小売価格 **¥16,500** (税込)

	品番	TAISコード
600mm	SBR-10-060	00254-000113
900mm	SBR-10-090	00254-000062
1200mm	SBR-10-120	00254-000117

システム木手すり 曲げセット

立ち座り

歩行

段差

■600mm
(芯々:700mm)



■900mm
(芯々:1000mm)



■1200mm
(芯々:1300mm)



メーカー希望
小売価格 **¥18,040** (税込)

	品番	TAISコード
600mm	SBR-20-060	00254-000114
900mm	SBR-20-090	00254-000063
1200mm	SBR-20-120	00254-000118

システム木手すり 跳ね上げセット

立ち座り

歩行

扉・押し入れ

■600mm
(芯々:700mm)



■900mm
(芯々:1000mm)



■1200mm
(芯々:1300mm)



メーカー希望
小売価格 **¥33,000** (税込)

	品番	TAISコード
600mm	SBR-70-060	00254-000115
900mm	SBR-70-090	00254-000064
1200mm	SBR-70-120	00254-000119

付属 手すりホルダー



システム木手すり 取り外しセット

立ち座り

歩行

扉・押し入れ

■600mm (芯々:700mm)



■900mm (芯々:1000mm)



■1200mm (芯々:1300mm)



メーカー希望
小売価格 **¥19,800** (税込)

	品番	TAISコード
600mm	SBR-80-060	00254-000116
900mm	SBR-80-090	00254-000065
1200mm	SBR-80-120	00254-000120

付属 手すりホルダー




バスポジ-eは基本セットとブラケット・オプションの組み合わせで様々な状況に合ったご利用者様に必要な手すりが提供できます。

システムエンドブラケット(直)

メーカー希望
小売価格 **¥3,850**(税込)


品 番
SBR-100-10

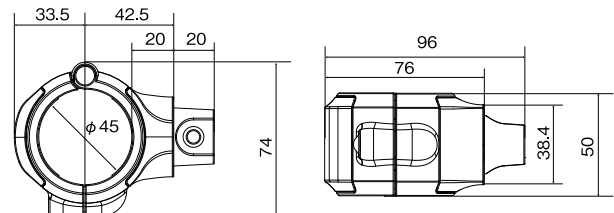

システムエンドブラケット(曲げ)

メーカー希望
小売価格 **¥4,620**(税込)


品 番
SBR-100-20

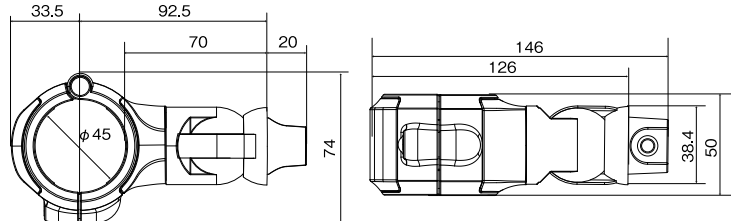

システム接続ブラケット(直×直)

メーカー希望
小売価格 **¥4,950**(税込)


品 番
SBR-100-30

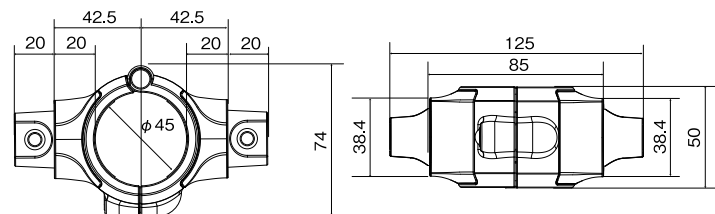

システム接続ブラケット(直×曲げ)

メーカー希望
小売価格 **¥5,720**(税込)


品 番
SBR-100-40

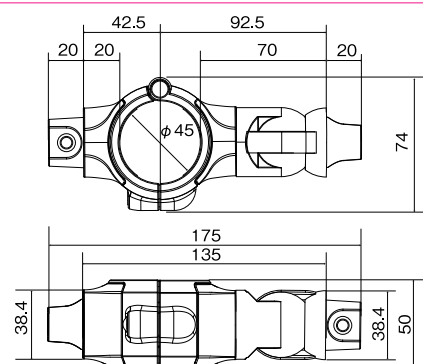

システム接続ブラケット(曲げ×曲げ)

メーカー希望
小売価格 **¥6,600**(税込)

品 番
SBR-100-50

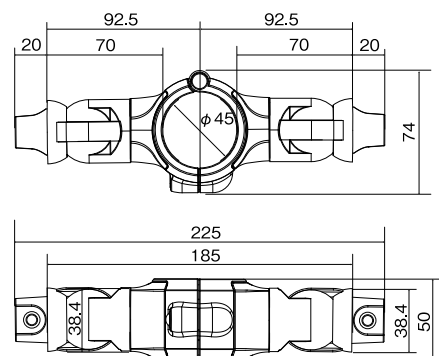


システム跳ね上げ 回転部エンド付 / システム跳ね上げ 先端部エンド付

システム跳ね上げ 回転部エンド付

メーカー希望
小売価格 **¥19,250**(税込)


品 番
SBR-100-71

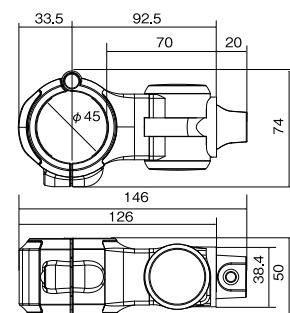

システム跳ね上げ 先端部エンド付

メーカー希望
小売価格 **¥6,050**(税込)

品 番
SBR-100-72


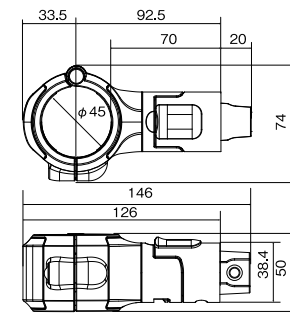


システムブラケット 取り外しセット

メーカー希望
小売価格 **¥11,000**(税込)

品 番
SBR-100-80


システム跳ね上げ 先端部エンド付と共通

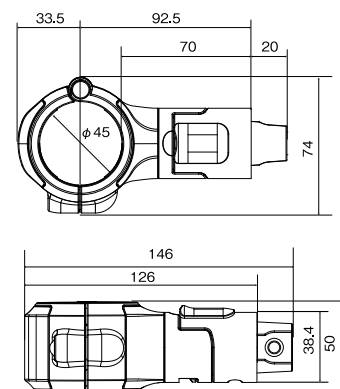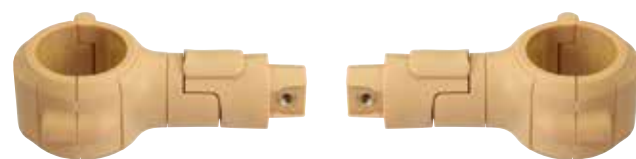

システム接続ブラケット T型 オフセット


メーカー希望
小売価格 **¥6,600**(税込)

品 番
SBR-100-60

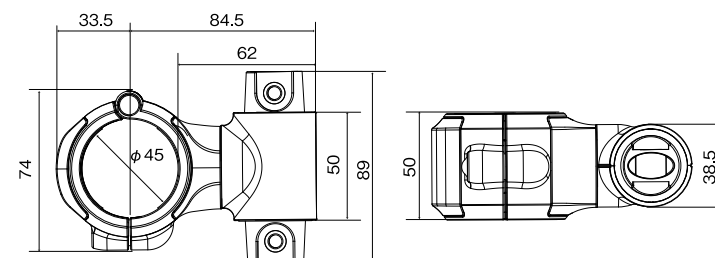

ご利用者に適した組合せができます

バスポジ-eのブラケットは各ブラケットの機構を自由に組み合わせるためにシステム化され、六角レンチ1本で組み換えが可能です。新たにバスポジ-eを追加する際など、ブラケットを追加しなくても、既についているブラケットに接続の機構部分を六角レンチでボルトオンするだけで必要な横手すり・オプションをつなげていけるシステムです。

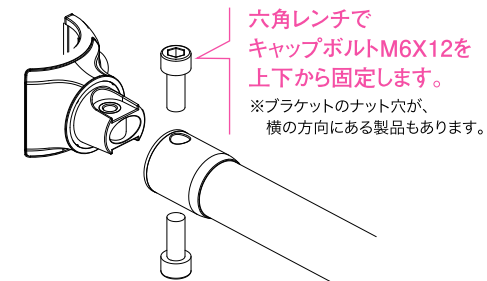

バスポジ-eのメンテナンス用補修部品

■ 丸型天井ベース  メーカー希望 小売価格 ¥11,000 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>BPE-400-10</td></tr></table>	品番	BPE-400-10	■ T型天井ベース  メーカー希望 小売価格 ¥14,300 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>BPE-400-20</td></tr></table>	品番	BPE-400-20			
品番	BPE-400-10							
品番	BPE-400-20							
■ 下部補助ベース  メーカー希望 小売価格 ¥5,500 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>BPE-400-30</td></tr></table>	品番	BPE-400-30	■ 耐水ベース  ※耐水ベース用 滑り止め付き ※セット販売のみ メーカー希望 小売価格 ¥8,800 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>BPE-100-90</td></tr></table> ⚠ ※浴室での使用はできません。	品番	BPE-100-90			
品番	BPE-400-30							
品番	BPE-100-90							
■ 丸型天井ベース・下部補助ベース共通滑り止め  4枚セット×2 メーカー希望 小売価格 ¥3,520 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>BPE-400-35</td></tr></table>	品番	BPE-400-35	■ 耐水ベース用滑り止め  4枚セット×2 メーカー希望 小売価格 ¥5,500 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>BPE-400-85</td></tr></table>	品番	BPE-400-85			
品番	BPE-400-35							
品番	BPE-400-85							
■ T型天井ベース用滑り止め  2枚セット×2 メーカー希望 小売価格 ¥5,500 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>BPE-400-25</td></tr></table>	品番	BPE-400-25	■ シリコン滑り止め  ※160mm角(5枚セット) メーカー希望 小売価格 ¥11,000 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>ENT-300-25</td></tr></table>	品番	ENT-300-25			
品番	BPE-400-25							
品番	ENT-300-25							
■ システムブラケット滑り止め  10枚入 メーカー希望 小売価格 ¥2,750 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>SBR-300-40</td></tr></table>	品番	SBR-300-40	■ ブラケット用ボルトM6×20  10個入 メーカー希望 小売価格 ¥2,750 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>NBR-100-11</td></tr></table>	品番	NBR-100-11	■ シングルブラケット滑り止め(小)  10枚入 メーカー希望 小売価格 ¥3,300 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>SBR-400-30</td></tr></table>	品番	SBR-400-30
品番	SBR-300-40							
品番	NBR-100-11							
品番	SBR-400-30							
■ 下部ベース  ※下部ベース固定用ナット類付き メーカー希望 小売価格 ¥4,180 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>BPE-400-80</td></tr></table>	品番	BPE-400-80	■ 下部ベースキャップ  5個入 ※インナーケース用ボルト2本付き メーカー希望 小売価格 ¥1,925 (税込) <table><tr><td>品番</td><td>BPE-400-81</td></tr></table>	品番	BPE-400-81			
品番	BPE-400-80							
品番	BPE-400-81							

■ ハンドルカバー

5個入

メーカー希望
小売価格 **¥5,500** (税込)

品 番 BPE-400-40

赤い色の
部分

■ ロックキャップ

5個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,925** (税込)

品 番 BPE-400-41

赤い色の
部分

※バネユニット固定用ボルト2本付き

■ 日常点検シール

10枚入

メーカー希望
小売価格 **¥3,300** (税込)

品 番 BPE-400-50

■ 赤ラインシール

10枚入

メーカー希望
小売価格 **¥2,200** (税込)

品 番 BPE-400-60

■ 警告窓シール

10枚入

メーカー希望
小売価格 **¥2,200** (税込)

品 番 BPE-400-70

■ ベスポジ-e クッション

メーカー希望
小売価格 **¥3,850** (税込)

品 番 BPE-300-25

■ 天井ベースキャップ

5個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,650** (税込)

品 番 BPE-400-11

■ キャップボルトM6×20

※膝当て、肘置き、
プッシュ手すりの
クッションの固定に使用。
20個入

メーカー希望
小売価格 **¥660** (税込)

品 番 SBR-200-40

■ キャップボルトM6×12

※システム木手すりジョイント固定に
使用
※システム木手すり固定
システムブラケット固定に使用
20個入

メーカー希望
小売価格 **¥550** (税込)

品 番 SBR-200-10

■ ジョイントリング

10個入

メーカー希望
小売価格 **¥3,300** (税込)

品 番 SBR-200-30

赤い色の
部分

■ エンドキャップ

10個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,650** (税込)

品 番 SBR-300-30

赤い色の
部分

■ 手すりホルダー

2個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,100** (税込)

品 番 SBR-100-75

■ 専用垂直器

2個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,100** (税込)

品 番 12021

■ 蓄光リング

4個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,100** (税込)

品 番 BPE-400-90

消灯時の発光イメージ