



ユニットバス等の
浴室に対応
使い易い快適な手すり

コメット

浴室用 空間手すり

コメット対応グリップアーム

コメット対応フープアーム

DIPPERホクメイ株式会社
〒544-0001
大阪府大阪市生野区新今里2-4-1
大阪 TEL.06-6754-0625 FAX.06-6758-6485
東京 TEL.03-5818-0621 FAX.03-5818-0624
中部 TEL.052-459-3004 FAX.052-453-1277
福岡 TEL.092-686-9300 FAX.092-686-9260
<http://www.dipper-hokumei.co.jp>


2014.3.1/10,000

浴室用 空間手すり
ユニットバス等の浴室に対応
使い易い快適な手すり

コメット

コメット対応グリップアーム

コメット対応フープアーム

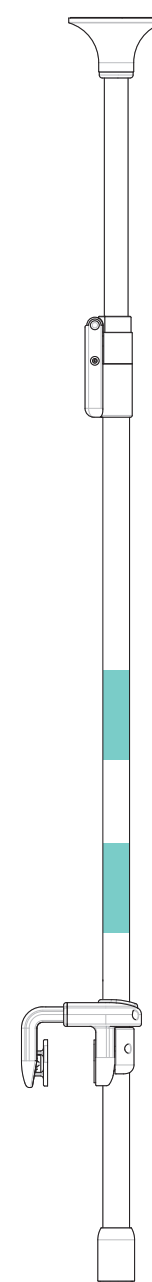

ユニットバスでラクラク入浴♪



ユニット
バスに
対応

いつも人々にやさしく輝いています
DIPPER® ホクメイ

介護保険購入対象品

ユニットバス等の浴室に対応 使い易い快適な 手すりコメット

利用者のこんな悩みを解決してくれます

《手すりは欲しいけど工事は出来ない》

《理想の場所に取り付けたい》

《狭い浴室でも利用したい》

コメットならではの 安心安全

安全

介護者も助かる、
安心・安全サポート

浴槽と天井と床とでしっかり
3点固定されているので、
安定性が高くご利用者だけでなく、
介助者にとっても負担が
軽減され、安心安全に
利用できます。

安心

浴室内での動きを
広範囲にフォロー

浴室の中央に設置出来る為、
またぎ動作や、立ち座り、
浴室内での移動を
サポートしてくれる
安心補助用具です。

自立

立ち上がりから
入浴までらくらく

体重の65%は上半身にあり、
上半身のふらつきを支えるには
肩口程度の高い位置を
支持することで、バランスを
高めて浴槽またぎ動作を
実現しています。

WEBでもコメットの商品内容を
紹介しております。

<http://www.dipper-hokumei.co.jp/comet/comet.html>



コメット単体

コメット単体でのメリット

メリット
1

穴あけ工事不要。
ユニットバスを含め浴室に
後付けできます。

メリット
2


高い位置を持つことで、立位
バランスが取りやすく、自然な体勢
で跨ぎ動作がより安全に行えます。

メリット
3

跨ぎ動作に加え、浴槽内や
洗い場からの立ち上がりなどの
動作をサポートします。

本体を握ることによって
より安定した
入浴動作が可能です。

製品仕様

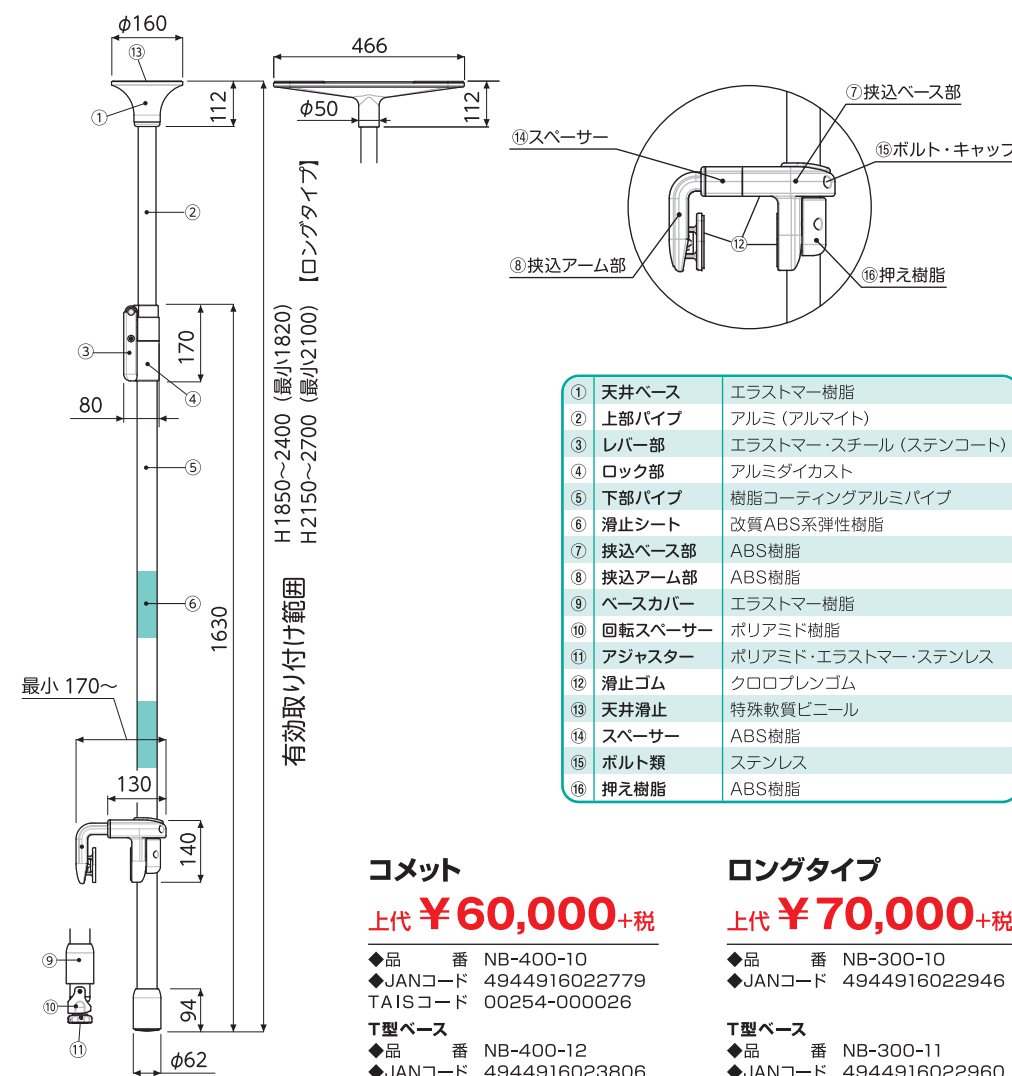

コメット

上代 **¥60,000** +税

◆品番 NB-400-10
◆JANコード 4944916022779
◆TAISコード 00254-000026

T型ベース

◆品番 NB-400-12
◆JANコード 4944916023806

ロングタイプ

上代 **¥70,000** +税

◆品番 NB-300-10
◆JANコード 4944916022946

T型ベース

◆品番 NB-300-11
◆JANコード 4944916022960





グリップアーム

グリップアームのメリット

- メリット 1** グリップ部に突起が付いていることで、指の引っかかりを生み出し、最小限の握力で支持できます。
- メリット 2** ポール本体を中心とした動作や身体の上下運動をサポートします。
- メリット 3** グリップは利用者に合わせて、角度や高さを自由に変わることができます。


フープアーム

フープアームのメリット

- メリット 1** 利用者が同一の高さに手を揃えることができ、身体の高さの調整等を行うことができます。
- メリット 2** グリップの凹凸や両端の卵形状がストッパーの役目をし、利用者の手の滑りを抑え、より確実に握れます。
- メリット 3** 体幹のプッシュアップ使用又は動作による浴槽への跨ぎ動作や移動動作をサポートします。



製品仕様

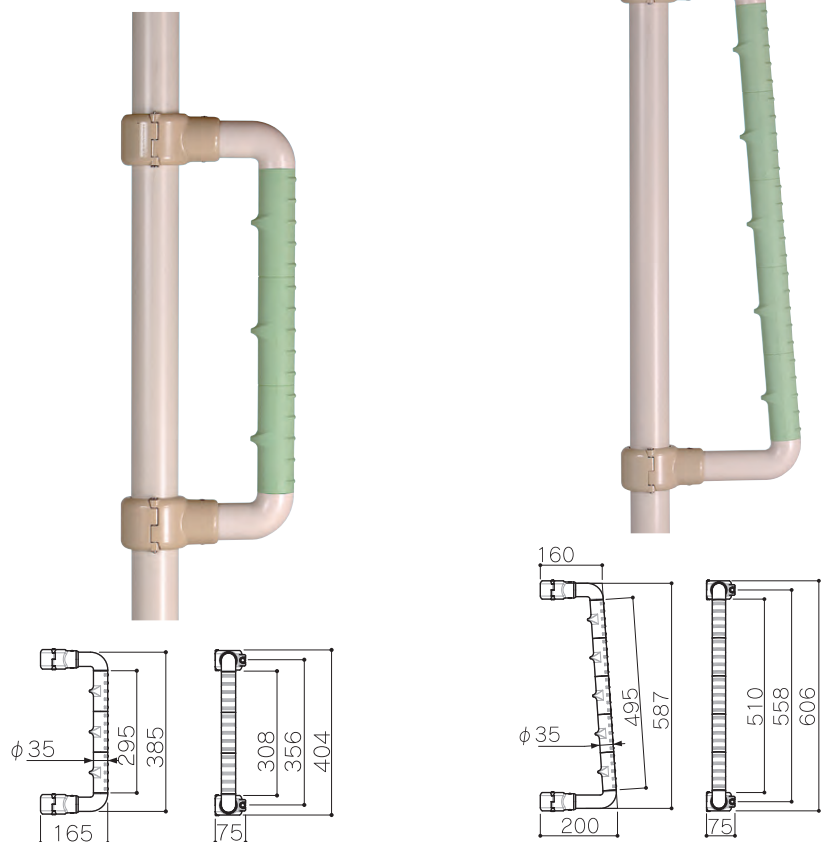

NBグリップアーム3P

上代 **¥18,000**+税


◆品番 NB-520-20
◆JANコード 4944916022922

NBグリップアーム傾斜5P

上代 **¥20,000**+税

◆品番 NB-520
◆JANコード 4944916022908

製品仕様

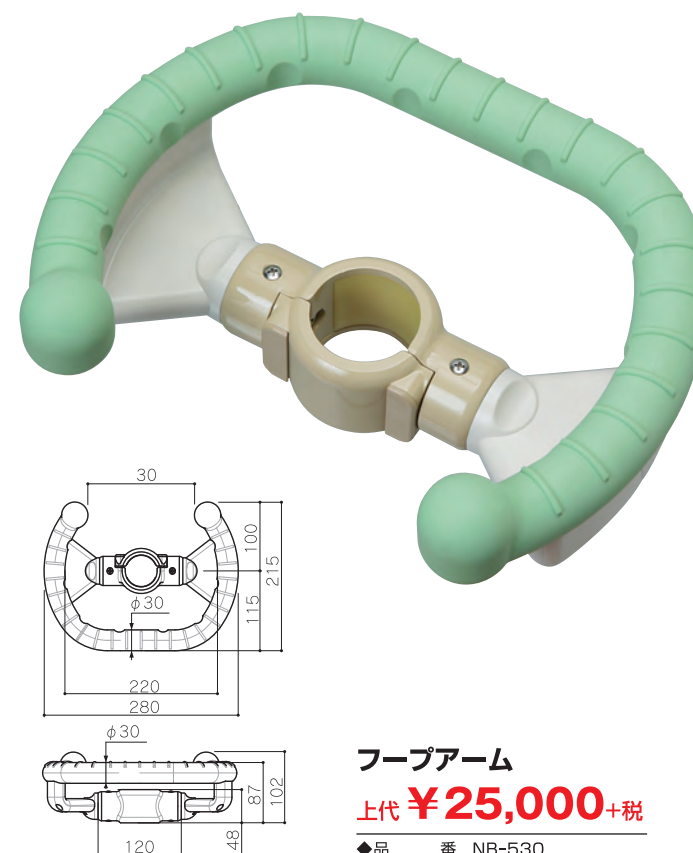

フープアーム

上代 **¥25,000**+税

◆品番 NB-530
◆JANコード 4944916022007



フープアームセット

上代 **¥85,000**+税

◆品番 NB-400-50
◆JANコード 4944916023868
TAISコード 00254-000027
T型ベース
◆品番 NB-400-52
◆JANコード 4944916023875

コメットの取り付け手順



手順
1



ポールを伸ばします

手順
2



ロックします

手順
3




滑止シートを本体に貼り付けます

手順
4



挟み込み部分を締めて固定します

アジャスター構造

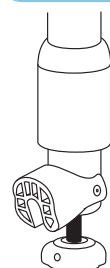

アジャスターを上げることで
床面掃除が容易に行えます。



グレーチング





スノコ

洗い場にあるグレーチング・スノコ・排水溝の蓋等の上にも設置が可能です。下部のガイドゴムを上へ上げるとアジャスター・ストッパー（オレンジ色）があります。解除するとアジャスター部分が約2cm上がり、一時的に接地面から浮かせることができます。

滑止シートの取り付け方法

滑止めシートはご利用者の使用方法に合わせて使い易い位置に貼り付けてください。

- 1 ポールの汚れを拭き取りよく乾かしてください。
- 2 滑止めシートの剥離紙をはがします。
- 3 ポールに対してまっすぐに合わせ中央から端に気泡が入らないよう慎重に貼り付けてください。

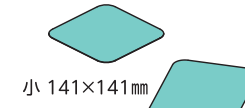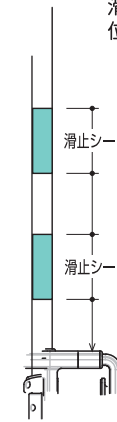


警告

- ⑫滑止ゴム、⑬天井滑止は消耗品です。本製品の再施工時には新しいものと交換が必要です。傷んだまま使用しないでください。

取り付け可能な浴槽の形状


NBスペーサー（オプション）

標準仕様では（スペーサー1個付属）で5cm～15cmの浴槽縁幅に対応できます。別売のオプションNBスペーサーを使用することで15cm～20cm幅の浴槽縁幅に対応できます。


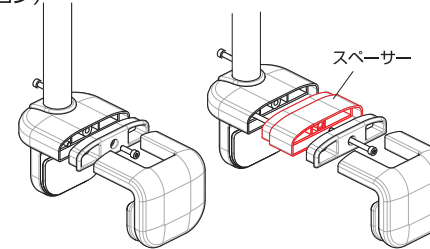


標準のセットで取り付け可能な厚みは5cm～15cmです。15cmをこえる幅の浴槽に取り付ける場合はオプションのスペーサーをご使用ください。

浴槽幅（厚み）
5cm～15cm…スペーサー無し
10cm～15cm…スペーサー1枚（付属）
15cm～20cm…スペーサー2枚（別売）

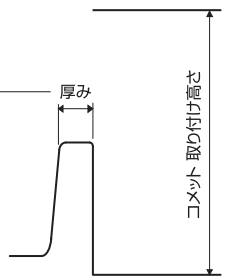


取り付けを行う浴室の天井が傾いている、又はカーブになっている場合は取り付けできません。

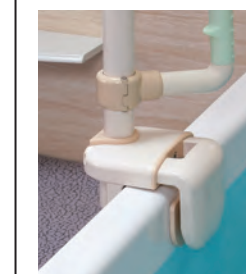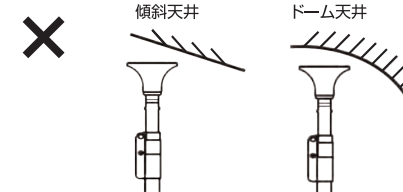

挟み込み部の赤いマークが消えるまで締め付けてください。


取り付け高さ 1m85cm～2m40cm

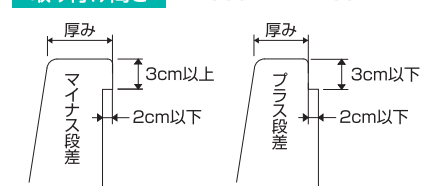

浴槽幅 対応
5cm～10cm
10cm～15cm…（付属スペーサー）
15cm～20cm…（別売スペーサー）

コメット対応オプション製品

NB天井用T型ベース（コメット専用）

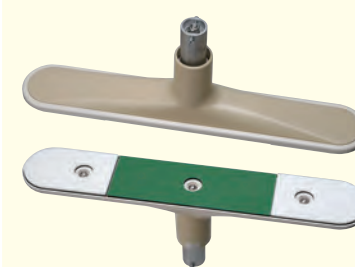

ユニットバスの点検口等をよける場合に使用します。

上代 **¥10,000+税**

◆品番 NB-500-10
◆JANコード 4944916022663


NB天井用丸ベース



上代 **¥9,000+税**

◆品番 NB-500-20
◆JANコード 4944916022670

NBスペーサー

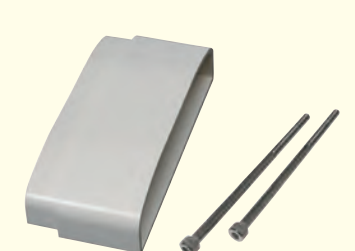

浴槽縁15cmを超える場合に使用し、20cmまで対応できます。

上代 **¥6,000+税**

◆品番 NB-200-10
◆JANコード 4944916022823

